

GUARDIAN™ CONNECT DLA PARTNERÓW TERAPII



Czym jest system Guardian™ Connect?

- Guardian™ Connect to niezależny system Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM), który zapewnia osobie z cukrzycą wgląd w wartości glukozy z sensora w czasie rzeczywistym, za pomocą kompatybilnego urządzenia mobilnego i aplikacji Guardian™ Connect.
- Informacje z aplikacji mogą być udostępniane wybranym Partnerom Terapii i członkom zespołu terapeutycznego poprzez platformę CareLink™ Connect. Wgląd w dane jest możliwy przy pomocy dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
- Użytkownik systemu Guardian™ Connect może udostępniać swoje dane nawet 5 Partnerom Terapii.





Kim jest Partner Terapii i jakie ma z tego korzyści?

- Jako Partner Terapii masz możliwość wglądu w wartości glukozy oraz otrzymywania powiadomień i alarmów w czasie rzeczywistym, w oparciu o ustawienia wybrane przez użytkownika aplikacji Guardian™ Connect.

- Zapewnia to większe poczucie bezpieczeństwa i spokoju, ponieważ na bieżąco masz dostęp do informacji o zmianach wartości glukozy bliskiej osoby.

W jaki sposób zarejestrować się jako Partner Terapii?

- Użytkownik Guardian™ Connect tworzy konto Carelink™ Personal, jeśli nie posiadał go wcześniej.
- Partner Terapii tworzy swoje konto CareLink™ Personal, w tym nazwę użytkownika i hasło.
- Partner Terapii wprowadza nazwę użytkownika pacjenta i wysyła prośbę o udostępnianie danych.
- Użytkownik przyznaje dostęp Partnerowi Terapii (ten krok należy wykonać dla każdego nowego Partnera Terapii).
- Wejdź na: <http://carelink.minimed.eu> i wykonaj poniższe czynności:

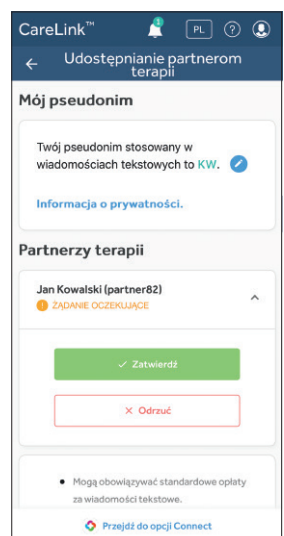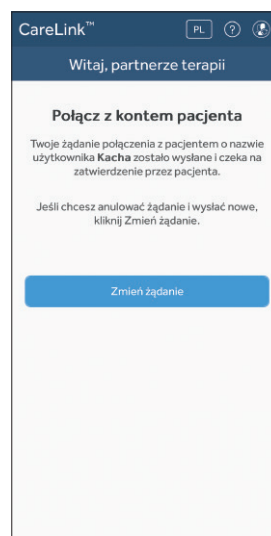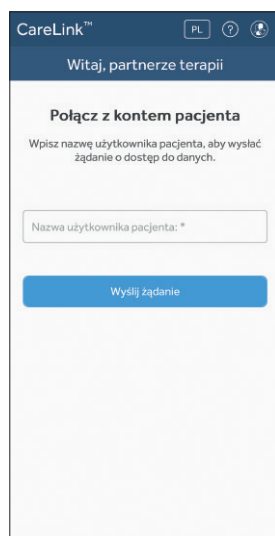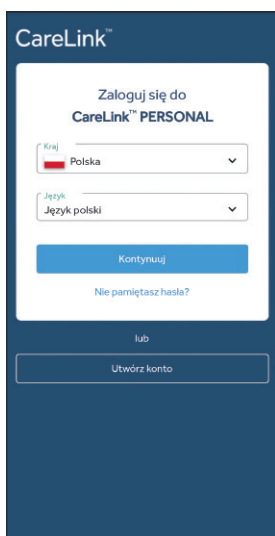

Jakie informacje uzyskasz będąc Partnerem Terapii?

Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe (SMS) mogą być wysyłane do Partnerów Terapii, aby poinformować ich o utrzymującym się powiadomieniu lub alarmie.

Wiadomości tekstowe składają się z 3 wierszy:

- Tekst alarmu lub powiadomienia.
- Inicjały osoby, której to powiadomienie dotyczy.
- Czas, w którym wiadomość została odebrana przez CareLink™.

Co zrobić, aby otrzymywać wiadomości tekstowe (SMS)?

- Użytkownik systemu Guardian™ Connect oraz Ty, jako Partner Terapii, musicie wyrazić zgodę na wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych.
- Aby otrzymywać wiadomości tekstowe, musisz wprowadzić swój numer telefonu – wraz z kodem kraju, ale bez poprzedzających go zer ani znaku +.
- W swoich ustawieniach programu CareLink™ Connect możesz kliknąć „Wysyłaj wiadomości tekstowe”, ale nie otrzymasz automatycznie wiadomości testowej.
- Będziesz otrzymywać wyłącznie powiadomienia i alarmy, które zostały ustawione przez użytkownika aplikacji Guardian™ Connect.
- Możesz włączyć/wyłączyć wszystkie wiadomości albo wybrać jedno lub więcej powiadomień.
- Możesz dopasować czas opóźnienia wysyłania powiadomienia według własnych potrzeb. Jeśli nie ustawisz opóźnienia, otrzymasz powiadomienie SMS od razu, pod warunkiem, że użytkownik natychmiast nie wybierze funkcji drzemki lub nie skasuje alarmu w aplikacji.

Uwaga: Aby otrzymywać powiadomienia SMS, musisz mieć możliwość otrzymywania wiadomości tekstowych, zapewnioną przez operatora sieci komórkowej.

Powiadomienia SMS to natychmiastowa informacja o zmianach stężenia glukozy użytkownika Guardian™ Connect. Jednakże zakłócenia w połączeniu z Internetem po stronie użytkownika lub po stronie Twojej sieci komórkowej mogą owocować nieotrzymaniem powiadomień. Ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na tych alarmach.

Platforma CareLink™ Connect


- Dostęp do platformy CareLink™ Connect można uzyskać za pomocą komputera, urządzenia z systemem Android oraz iOS (iPad, iPod, iPhone) lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, poprzez kliknięcie w link: <http://carelink.minimed.eu>
- Platforma CareLink™ Connect wyświetla podobne informacje do aplikacji użytkownika.
- Jak zapisać zakładkę CareLink™ Connect na Twoim urządzeniu mobilnym (instrukcja dla użytkowników urządzeń z systemem iOS firmy Apple):
 1. Wejdź na stronę: carelink.minimed.eu i dotknij środkowej ikony na dole ekranu.
 2. Wybierz „Dodaj zakładkę” lub „Do ekranu początkowego”.
 3. Po zakończeniu procesu powinna pojawić się biała ikona Guardian™ Connect.

Zakładka CareLink™ Connect – ekran główny


- Dostęp do ekranu głównego jest możliwy ze strony wyświetlanej na urządzeniach mobilnych i komputerach.
- Ekran główny pokazuje:
 - Aktualną wartość glukozy z sensora.
 - Strzałki trendu.
 - Okno powiadomień.

Zakładka CareLink™ Connect – ekran Status Urządzenia


- W przypadku ekranu Status Urządzenia dostęp również jest możliwy ze strony wyświetlanej na urządzeniach mobilnych i komputerach.
- Podobnie jak w aplikacji Guardian™ Connect, ekran Statusu Urządzenia pokazuje kluczowe informacje dotyczące sensora i systemu Guardian™ Connect:
 - Guardian™ Connect: status połączenia.
 - Sensor: kalibracja, czas życia sensora, status połączenia.
 - Transmitter: stan baterii.

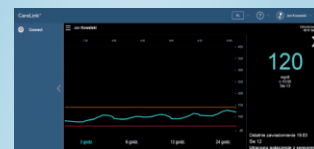

CareLink™ Connect – ekran główny (komputer)

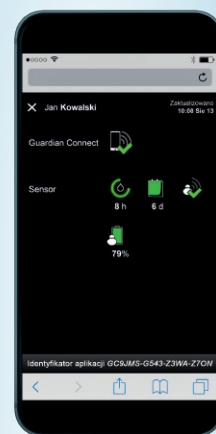

Zakładka CareLink™ Connect – ekran Status Urządzenia (urządzenie mobilne)

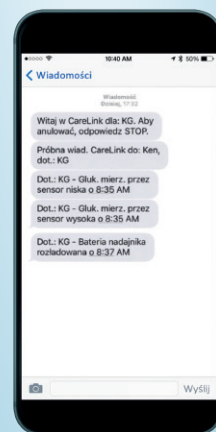

Wiadomości tekstowe SMS

Medtronic

Medtronic Poland Sp. z o.o.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
tel.: +48 22 465 69 00
fax: +48 22 465 69 17

Lista wskazań, przeciwwskazań, środków ostrożności, ostrzeżeń i potencjalnych zdarzeń niepożądanych znajduje się w Instrukcji Użytkownika.

UC201806578a PO

© 2020 Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic, logo Medtronic i Further, Together są znakami towarowymi firmy Medtronic. Wszystkie pozostałe marki są znakami towarowymi firmy Medtronic.

www.guardianconnect.pompy-medtronic.pl

**MASZ WIĘCEJ
PYTAŃ?**

Skontaktuj się
z naszą całodobową
infolinią

tel.: +48 22 46 56 987