



UPPLADNINGS GUIDE

Till CareLink™ Personal

Enkelt att använda, Enkelt att dela.
Kunskap för bättre diabetesbeslut.

**DET ENDA DU
BEHÖVER ÄR DATOR,
PUMP OCH BS-MÄTARE**
Plugga in din USB eller
blodsockermätare till din dator

- Se till att din CareLink™ USB eller blodsockermätare är så nära din pump som möjligt
- Behåll länkningen till din pump



**Säkerställ att din pump
är redo för uppladdning**
Kolla så att din pump inte har
något av följande skärmbilder:




- ☐ Ingen temporär basal/
temp mål
- ☐ Inga larm
- ☐ Inga pågående bolusar
- ☐ Inte lågt batteri

Medtronic

LADDA UPP DIN PUMP

LOGGA IN PÅ:


www.carelink.minimed.eu

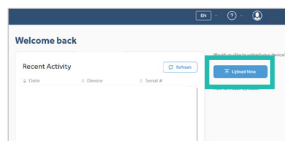

- 1** Klicka på 'Ladda upp nu' och vänta på skärmen för uppladaren.




- 2** Klicka på 'Lägg till ny enhet' om det är din första uppladdning.

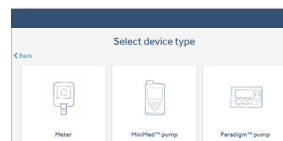


- 3** Välj din enhet om det är din första uppladdning.




- 3a** Om det inte är din första uppladdning, välj den enhet du vill ladda upp.

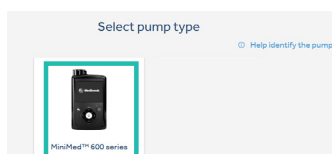


- A.** Välj din typ av insulinpump.

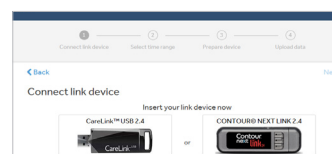

- B.** Anslut din mätare eller Carelink™ USB.

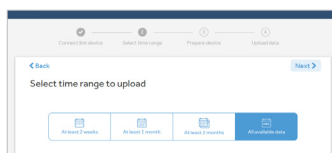


- C.** Välj tidsperiod för uppladdningsdata. Välj gärna senaste 2 veckorna för att minska uppladdningstid.

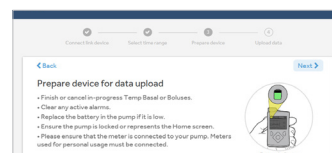


- D.** Följ instruktionerna på skärmen för att förbereda pumpen för uppladdning



- E.** Skriv in pumpensserienr. Som du hittar under meny -status-pump eller på baksidan av pumpen.

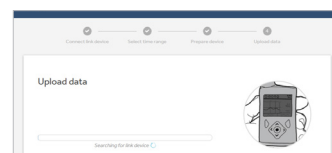

- F.** Vänta, uppladdningen pågår.

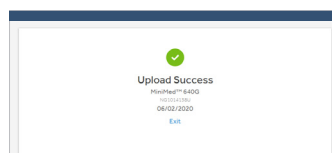

- G.** Uppladdning klar.
Nu finns dina rapporter tillgängliga för dig och din vårdgivare under fliken rapporter.