

# GUIDE D'INSTALLATION

## Mise à jour CareLink™ Perso

Logiciel d'aide pour le suivi de votre diabète au quotidien.

### CARELINK™ PERSO POUR LE SUIVI DE VOTRE DIABÈTE



Observez vos données ou vos courbes de glycémie grâce aux différents rapports disponibles



Téléchargez régulièrement vos données, au minimum 1 fois par mois



Partagez et discutez avec votre professionnel de santé

### TÉLÉCHARGEZ LA MISE À JOUR CARELINK™ PERSO (NOUVEAU FICHIER D'INSTALLATION)


Si vous utilisez plusieurs ordinateurs pour télécharger vos données, vous devez faire une mise à jour par ordinateur.



**1** Identifiez-vous  
Cliquez sur "Téléchargez"




**2** Cliquez sur le lien à télécharger

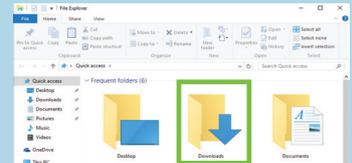


**3** Identifiez le fichier téléchargé sur votre ordinateur

### TÉLÉCHARGEMENT RÉALISÉ: PROCÉDEZ À L'INSTALLATION DU NOUVEAU FICHIER

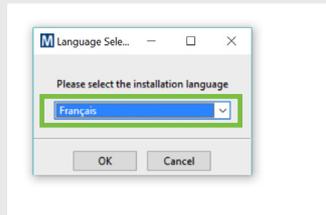


**1** Choisissez votre langue

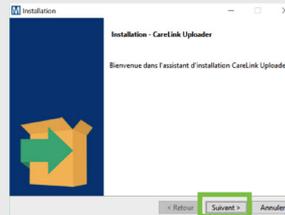

**2** Cliquez sur "Suivant"



**3** Cliquez une 2ème fois sur "Suivant"

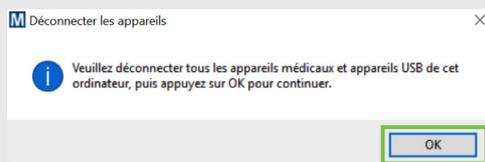

**4** Vérifiez que votre clé USB ou votre lecteur de glycémie ne soit pas branché et cliquez sur "OK"  
Cliquez sur "Fin" pour terminer l'installation



### TÉLÉCHARGEMENT DE VOS DONNÉES

Connectez-vous sur la page d'accueil CareLink™ Perso et suivez les instructions au dos de cette page pour effectuer le téléchargement de vos données à partir de votre pompe ou de votre lecteur de glycémie.

Medtronic

# GUIDE DE TÉLÉCHARGEMENT

## CareLink™ Perso

Ce document a pour but de vous accompagner dans le téléchargement de vos données.

### LES 4 ÉTAPES À SUIVRE POUR AJOUTER UNE POMPE OU UN LECTEUR DE GLYCÉMIE

**1** Choisissez la pompe ou le lecteur de glycémie

**2** Sélectionnez votre modèle de pompe

**2** Sélectionnez votre modèle de lecteur de glycémie

**3** Entrez le numéro de série de la pompe

**3** Sélectionnez votre lecteur de glycémie

**4** Vérifiez que votre pompe est prête puis cliquez sur "Ajout pompe"

**4** Vérifiez que votre lecteur de glycémie est prêt puis cliquez sur "Ajout lecteur"

### LES ÉTAPES DE PRÉPARATION

Branchez votre clé USB ou votre lecteur de glycémie sur votre ordinateur:

- Une fois branché, pensez à le placer le plus près possible de la pompe
- Vérifiez que le lecteur de glycémie est bien lié à la pompe




Assurez-vous que votre pompe est prête à être téléchargée. Vérifiez que la pompe ne se trouve pas dans ce type de situation (écran de la pompe à vérifier)



- Pas de basal temporaires actifs
- Pas d'alarmes actives
- Pas de bolus en cours
- Pas de batterie faible

### 2 ÉTAPES POUR TÉLÉCHARGER LES DONNÉES DE LA POMPE OU LE LECTEUR DE GLYCÉMIE

#### ÉTAPE 1

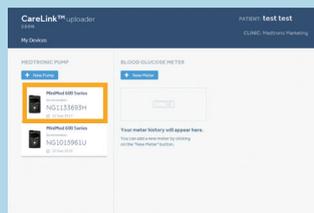

Sélectionnez le dispositif concerné

#### ÉTAPE 2



Vérifiez que le dispositif est prêt pour le téléchargement puis cliquez sur "Télécharger maintenant"

**PARTAGEZ VOS DONNÉES AVEC VOTRE MÉDECIN**



N'hésitez pas à discuter avec votre professionnel de santé de la synchronisation de votre compte CareLink™ Perso avec son logiciel CareLink™ Pro pour permettre l'accès à vos téléchargements.

**Medtronic (Suisse) SA**  
Talstrasse 9  
Case postale 449  
CH-3053 Münchenbuchsee  
diabetes.schweiz@medtronic.com

Pour toute question technique relative au logiciel CareLink™, contactez Medtronic Assistance Diabète au 0800 633 333.

© 2018 Medtronic. Tous droits réservés. Imprimé en Europe. Ne pas distribuer en France.  
UC201812041 SF