

SYSTÈME MINIMED™ 780G
LOGICIELS
& APPLICATIONS

CareLink™ Personal
MiniMed™ Mobile
CareLink™ Connect



SOMMAIRE

Logiciels et applications.....	03
Fonctionnement de l'application MiniMed™ Mobile.....	04
Téléchargement des données sur CareLink™ Personal.....	14
Fonctionnement de l'application CareLink™ Connect.....	17




LOGICIELS ET APPLICATIONS



Le système MiniMed™ 780G fonctionne à la fois avec les logiciels de téléchargement CareLink™ Personal et les applications mobiles.

2 INTERFACES CARELINK™


- CareLink™ Personal pour les patients
- CareLink™ Personal Partenaire de santé pour les professionnels de santé

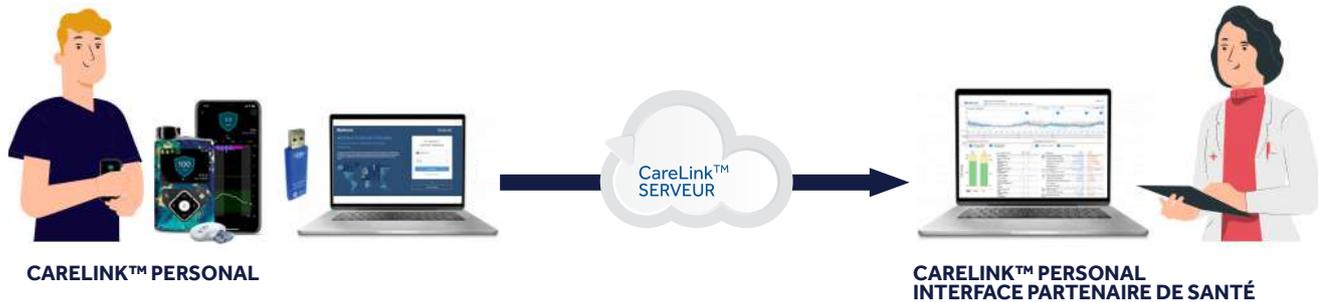

2 APPLICATIONS MOBILES

- MiniMed™ Mobile pour les porteurs d'une pompe MiniMed™ 780G (avec ou sans capteur)
- CareLink™ Connect pour les proches et professionnels de santé

Les applications sont disponibles sur Apple  et Android 

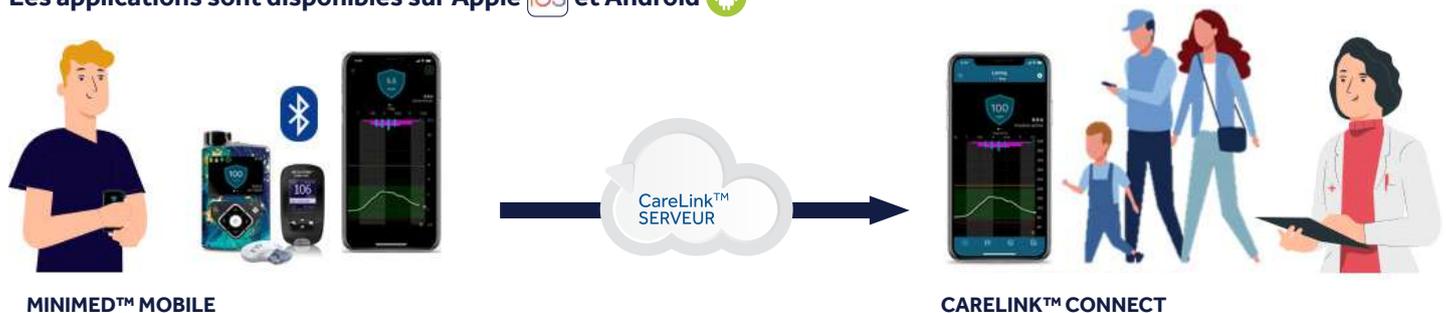

L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE



L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

DISCRÈTE

Affichage interactif simple
sur smartphone

PRATIQUE

Accès aux données envoyées
par la pompe et mises à jour
toutes les 5 minutes

SIMPLE

Téléchargements
automatiques vers
le logiciel
CareLink™ Personal



Il est possible d'utiliser l'application
avec ou sans capteur de glycémie.



*Connexion cellulaire requise entre l'application et le serveur CareLink™

INSTALLER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

1

Téléchargement possible sur l'Apple Store ou Google Play selon votre smartphone.



2

La création du compte CareLink™ Personal est obligatoire pour pouvoir utiliser l'application.


Une fois l'application ouverte, sélectionner votre pays de résidence.

- Cliquer sur « **Inscription** » si vous n'avez pas encore de compte CareLink™ Personal.
- Si vous possédez déjà un compte, cliquer sur « **Se connecter** » puis rendez-vous directement à l'étape N°5.



3

Accepter les différentes **conditions d'utilisation**.

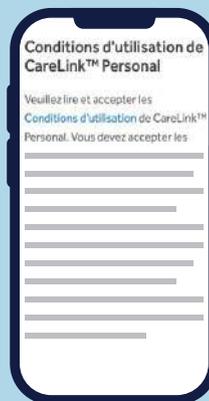

4

Compléter les informations de connexion puis choisir votre identifiant et mot de passe. Penser à bien les conserver.



INSTALLER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

5

Confirmer votre identité à l'aide d'un **code d'authentification** envoyé sur votre adresse e-mail.




6

Accepter les termes et conditions d'utilisation.



7

Suivre les instructions de l'application pour vérifier que vous possédez bien une pompe **MiniMed™ 780G**.

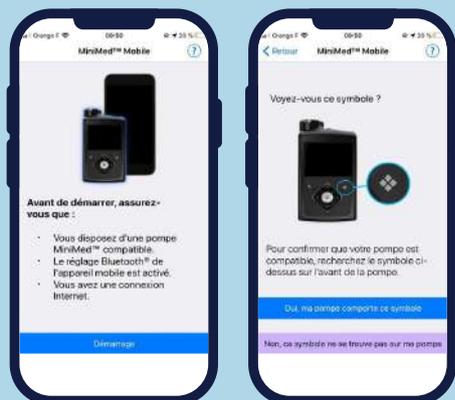

8

Sélectionner votre pompe MiniMed™ 780G.



INSTALLER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

9

Autoriser :

- envoi de notifications
- utilisation de Bluetooth
- demande de jumelage



10

Valider le message sur votre pompe.
L'appareillage est en cours.



11

Votre pompe est maintenant liée
à votre téléphone.



INSTALLER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE


12

Prendre connaissance des limites médicales de l'application puis valider en cliquant sur « **Accepter** ».



13


Choisir vos préférences de notifications.

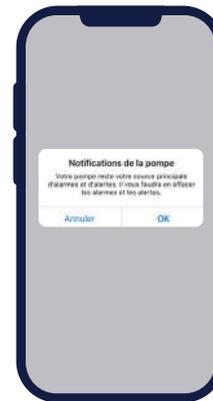


FÉLICITATIONS,
VOTRE APPLICATION
EST MAINTENANT
PRÊTE !



Sans capteur
de glycémie

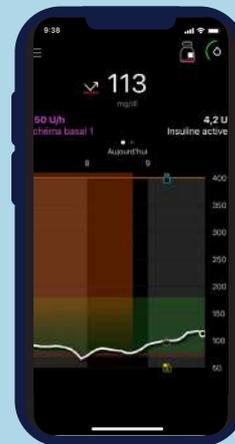


Avec capteur
sans activation
du **SmartGuard™**

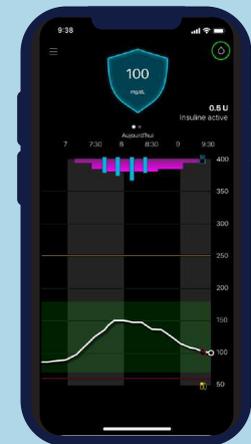

Avec capteur
et activation
du **SmartGuard™**

UTILISER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

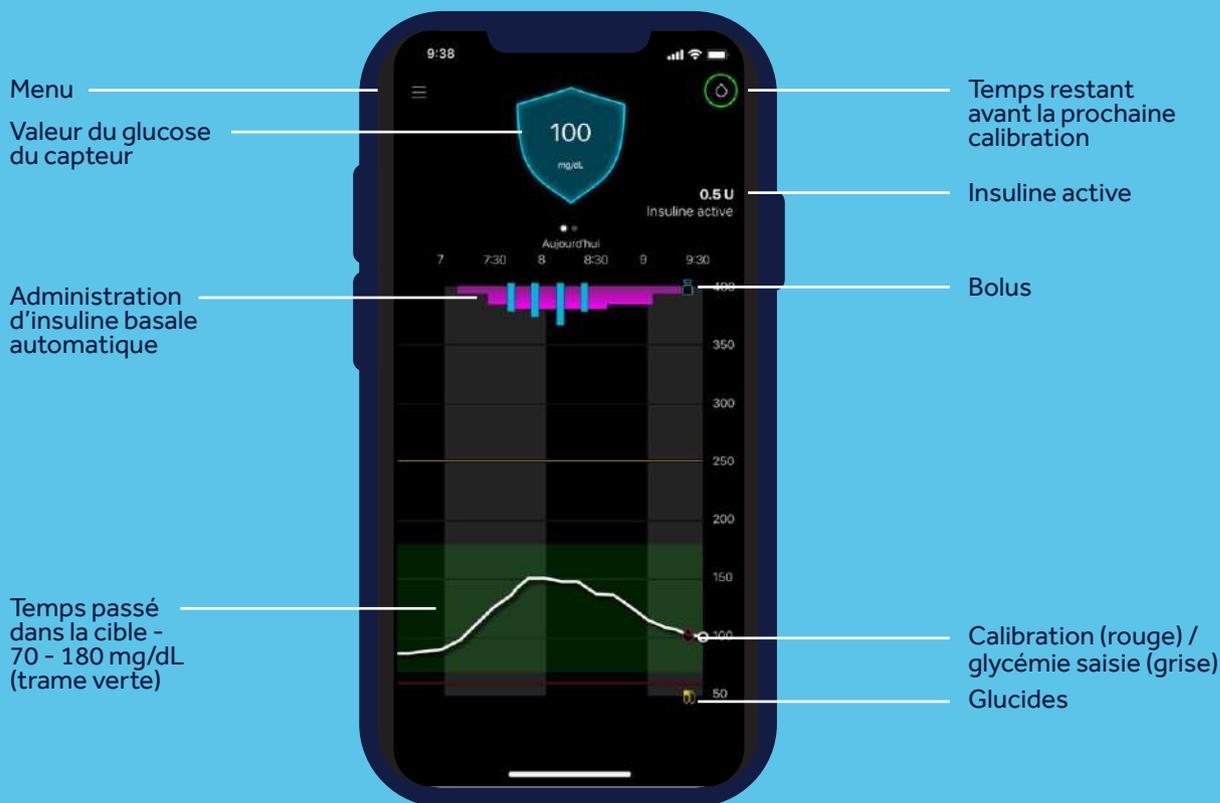


LE TIR* - TEMPS PASSÉ DANS LA CIBLE

Vous pouvez depuis votre application vérifier le temps passé dans la cible sur les dernières 24 heures. Balayer votre écran vers la gauche pour y accéder.

*TIR : TIME IN RANGE - temps passé dans la cible

UTILISER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

LE MENU PRINCIPAL

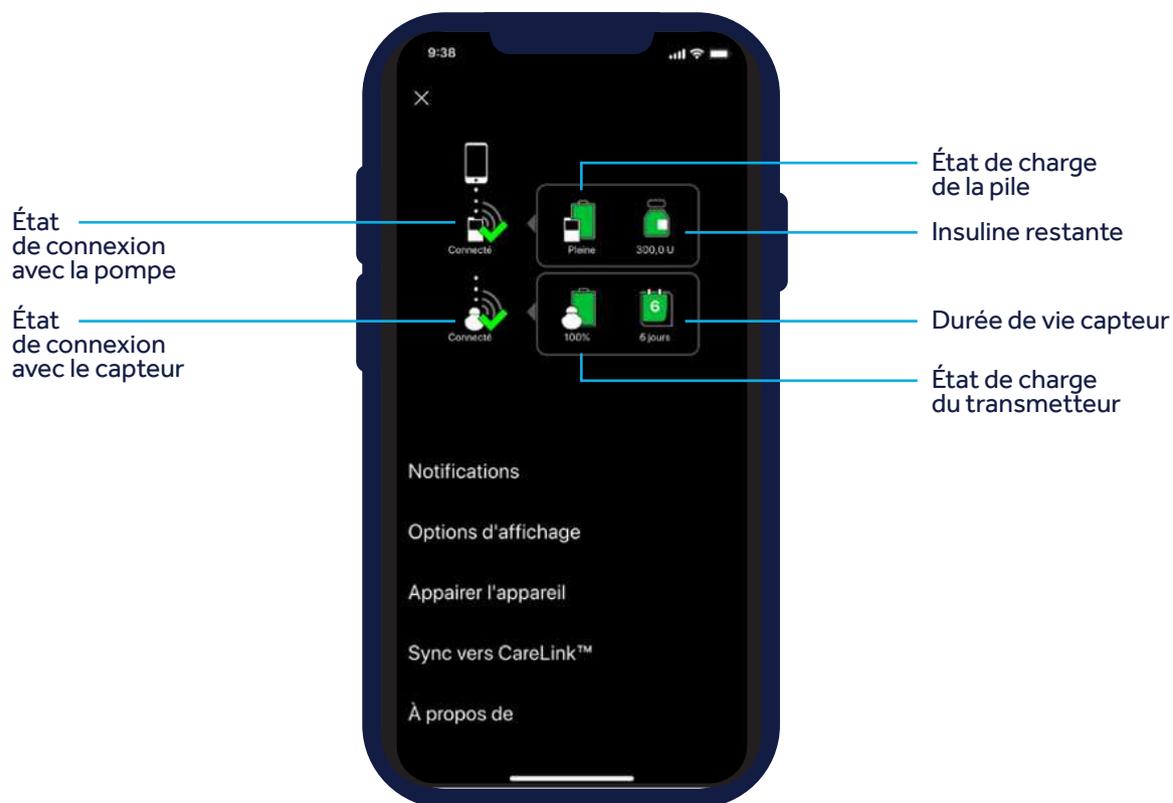

UTILISER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

1

LES PARAMÈTRES DE NOTIFICATIONS permettent de modifier vos préférences.

- **Notifications de la pompe :**
Activer ou désactiver les notifications d'alertes hyperglycémie, hypoglycémie et rappel de calibration.
- **Répéter les notifications :**
Répétition des alarmes jusqu'à effacement sur votre pompe.



Vous ne pouvez pas effacer les alarmes de votre pompe définitivement depuis votre mobile. Il est impératif d'effacer l'alarme sur la pompe et d'effectuer l'action demandée.

3

LES OPTIONS D'AFFICHAGES permettent de choisir l'unité de glucides.*

2

LA SYNCHRONISATION VERS CARELINK™ vous permet de choisir si vous souhaitez envoyer automatiquement vos données vers CareLink™ Personal.

- **Sync vers CareLink™ :**
Activer pour envoyer automatiquement vos données vers CareLink™ Personal
- **Gérer les partenaires de soins :**
Visualiser ou modifier les partenaires de soins qui ont accès à vos données.
- **Télétransmettre maintenant :**
Transmission manuelle des données vers CareLink™ Personal



4

APPAIRER L'APPAREIL

vous permet de ré-appairer la pompe actuelle en cas de déconnexion ou d'appairer une nouvelle pompe. Seule une pompe peut être appairée par application.

5

À PROPOS

vous donne accès au mode d'emploi de l'application.

*l'unité de glucides du système MiniMed™ 780G est uniquement en grammes.

UTILISER L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

LES NOTIFICATIONS



Si les notifications sont désactivées ou si le smartphone est en mode « **Ne pas déranger** », l'utilisateur ne recevra pas de notification sur l'application.


Si vous avez activé l'option notifications, celles-ci s'afficheront sur votre smartphone. Un code couleur est attribué à chacune :

- Rouge : notification d'alarme
- Orange : notification d'alerte
- Gris : notification de rappel
- Bleu : notification de messages du système

Où apparaissent les notifications ?

- Les notifications apparaissent en haut de l'écran d'accueil de l'application.
- Lorsque l'application n'est pas utilisée, les notifications s'affichent en haut de l'écran d'accueil du smartphone.

Le titre et le texte des notifications reproduisent ceux de la pompe.

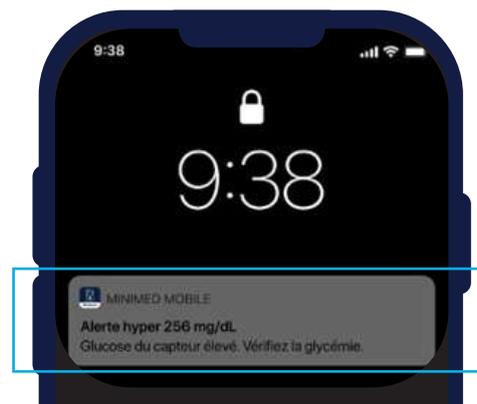


TÉLÉCHARGER VOS DONNÉES SUR CARELINK™ PERSONAL

Deux méthodes sont possibles pour télécharger les données de votre pompe MiniMed™ 780G

Via l'application mobile
MiniMed™ Mobile



Via CareLink™ Personal
avec votre clé USB bleue

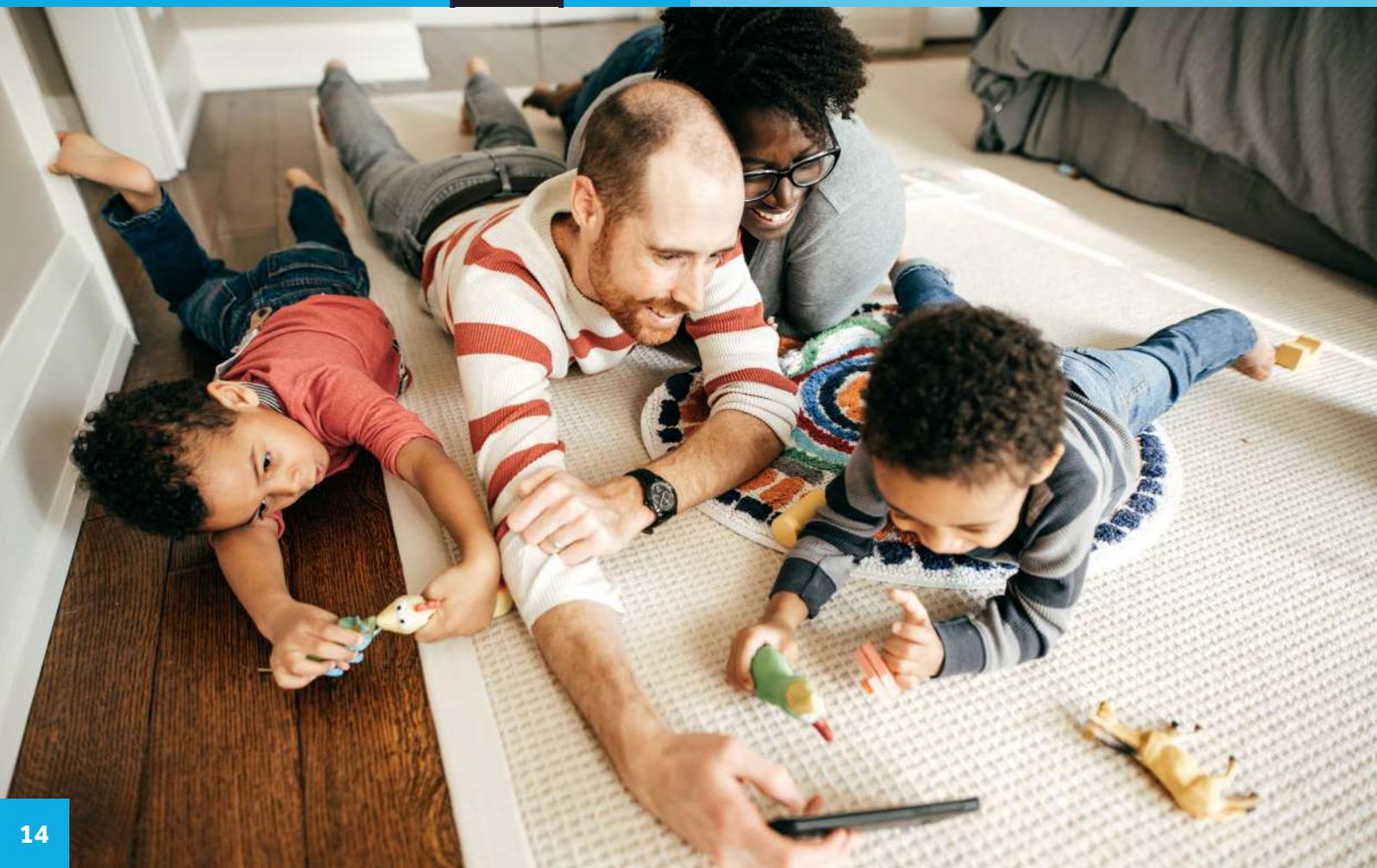

1. TÉLÉCHARGER LA POMPE MINIMED™ 780G DEPUIS VOTRE ORDINATEUR

POUR UN TÉLÉCHARGEMENT FACILE

1

Garder votre clé bleue à portée de main.

3

Se connecter à votre compte.

2


Aller sur www.carelink.minimed.eu depuis votre ordinateur.

4

Vérifier que votre pompe n'affiche pas un des écrans suivants : « Alarme » ou « Batterie faible ».

CONNECTER VOTRE POMPE

1^{ÈRE} EXTRACTION DE DONNÉES

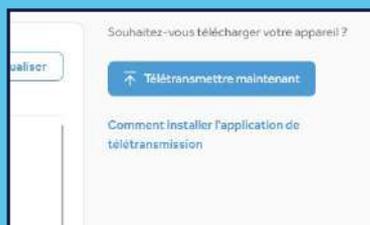

1 Cliquer sur **“Télétransmettre maintenant”**. Attendre que la fenêtre de téléchargement s'affiche.



2 Sélectionner **“Ajouter un appareil”**.



3 Sélectionner **“Pompe MiniMed™”**.



4 Sélectionner le type de pompe. Si vous ne le connaissez pas, cliquer sur **“Aide pour identifier la pompe”**.




5 Connecter la clé bleue et suivre les instructions de la section **“Télécharger mes données”** située en dessous.

1. TÉLÉCHARGER LA POMPE MINIMED™ 780G DEPUIS VOTRE ORDINATEUR

CONNECTER VOTRE POMPE

PROCHAINES EXTRACTIONS DE DONNÉES

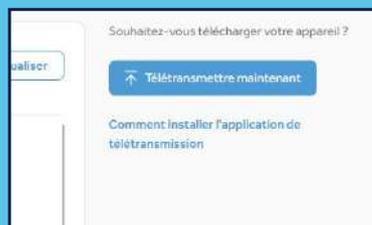

- 1 Cliquer sur **“Télétransmettre maintenant”**. Attendre que la fenêtre de téléchargement s'affiche.



- 2 Sélectionner l'appareil depuis lequel vous souhaitez télécharger les données.



- 3 Connecter la clé bleue pour télécharger les données en cliquant sur **“Télécharger vos données”**.

TÉLÉCHARGER LES DONNÉES



- 1 Sélectionner la période désirée.



- 2 Suivre les instructions à l'écran pour préparer votre pompe.




- 3 Entrer le code qui s'affiche sur l'écran de votre pompe. L'appareillage doit se faire à chaque extraction de données.



- 4 Sélectionner sur votre pompe **“Télétransmettre maintenant”**.



- 5 Patienter le temps que le téléchargement se réalise.

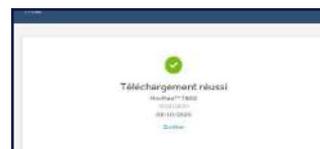

- 6 Vos données ont été téléchargées avec succès.

2. TÉLÉCHARGER LA POMPE MINIMED™ 780G VIA L'APPLICATION MINIMED™ MOBILE

1

Ouvrir votre application **MiniMed™ Mobile**.

2

Se rendre dans le menu principal de votre application en cliquant sur l'icône
Cliquez sur « **Sync vers CareLink™** ».



3

Vérifier que « **Sync vers CareLink™** » est activée.


La synchronisation vers CareLink™

vous permet d'envoyer automatiquement vos données vers CareLink™ Personal.

Lorsque vous souhaitez envoyer vos données **manuellement**, veuillez cliquer sur « **Télétransmettre maintenant** ».



Une connexion internet est nécessaire pour que votre smartphone envoie les données directement vers CareLink™ Personal.

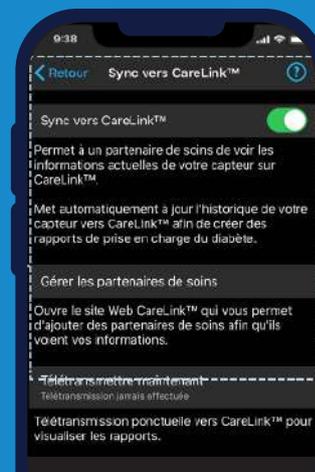

En vous connectant sur votre compte CareLink™ Personal depuis votre **ordinateur**, vous constatez que les données ont été envoyées **automatiquement**.

Date	Appareil	N° de série
21/10/2020, 12:47	MiniMed 780G	NG2402323H
19/10/2020, 21:57	MiniMed 780G	NG2402323H
19/10/2020, 16:42	MiniMed 780G	NG2402323H
18/10/2020, 21:58	MiniMed 780G	NG2402323H
17/10/2020, 21:57	MiniMed 780G	NG2402323H
17/10/2020, 10:05	MiniMed 780G	NG2402323H
07/10/2020, 11:16	MiniMed 640G	NG1328468H
07/10/2020, 11:16	MiniMed 640G	NG1328468H

L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT



L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT

PRATIQUE


Le patient autorise l'accès à ses données

ACCESSIBLE

N'importe où, n'importe quand (avec une connexion internet)

SÉCURISÉE

Le patient accepte ou non d'être suivi

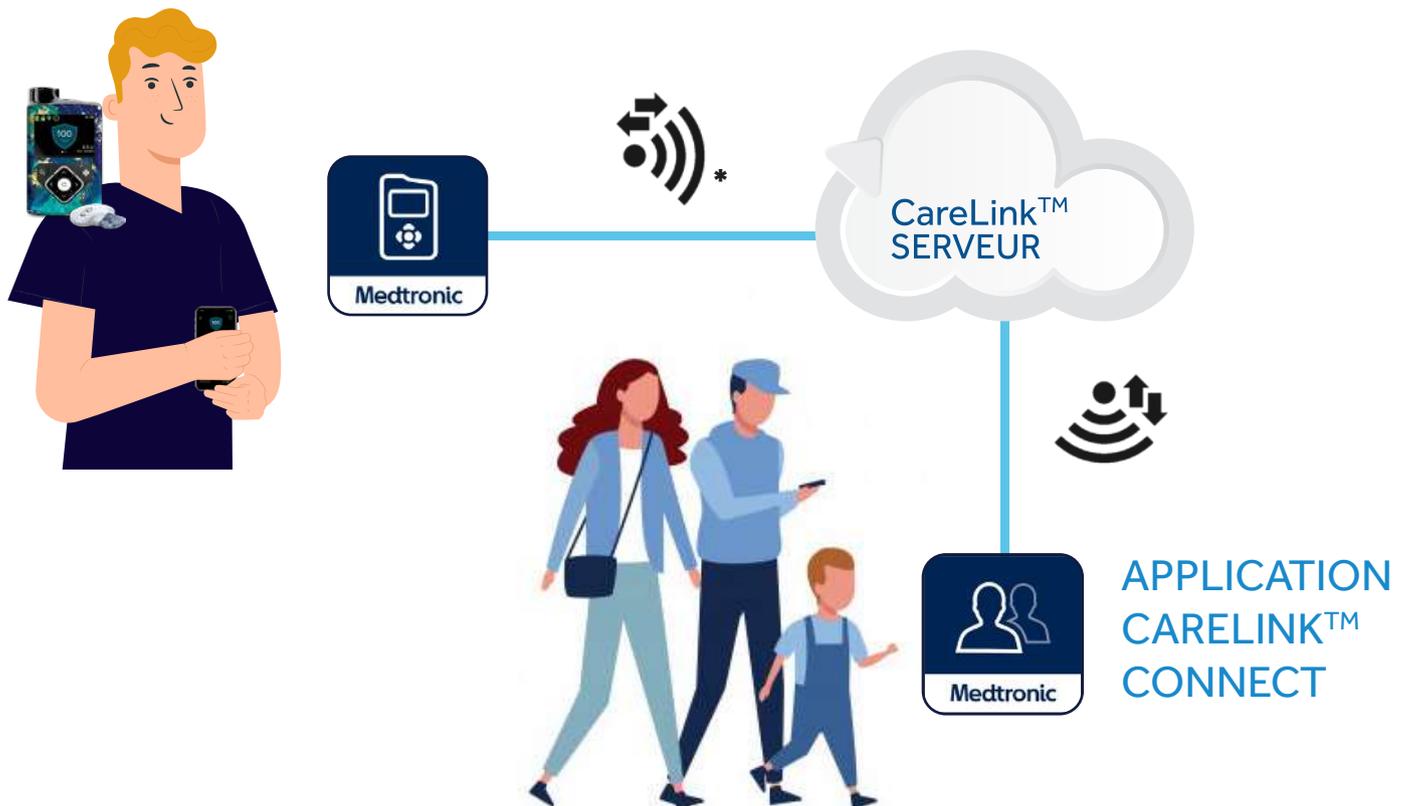

*Connexion cellulaire requise entre les applications et le serveur CareLink™ Personal

L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT


1

Téléchargement possible sur l'Apple Store ou Google Play selon votre smartphone.



2


Suivre les instructions et se laisser guider par l'application.

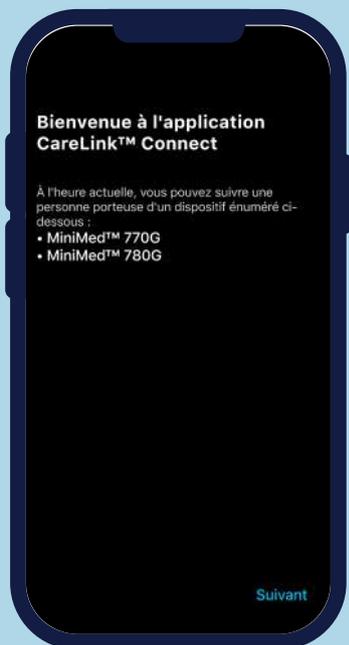

L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT

3

L'utilisateur doit créer un compte **partenaire de soins**. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Compléter les informations de connexion puis choisir votre identifiant et mot de passe. Penser à bien les conserver.


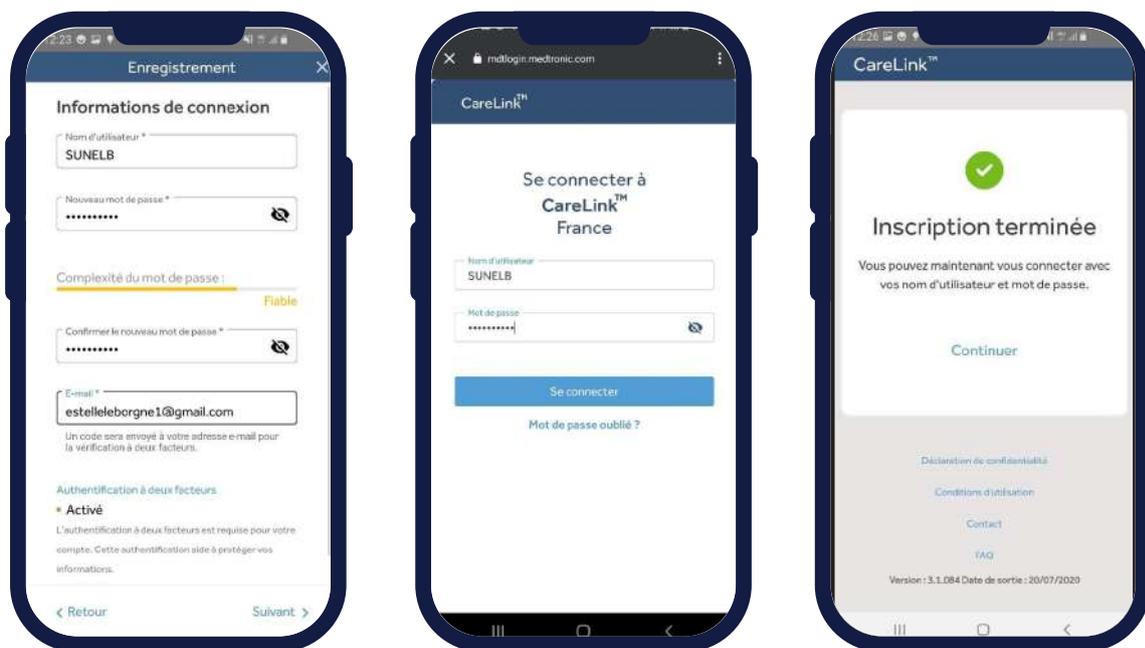


Il est possible de créer ce compte via l'application ou en vous connectant sur www.carelink.minimed.eu et en sélectionnant « **Partenaire de soins** » lors de la création du compte. Cette application est conçue pour suivre 1 personne par application.

L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT

4


L'utilisateur doit valider les messages qui s'affichent à l'écran en cliquant sur « Démarrer » puis « Configurer le verrouillage de l'écran ».

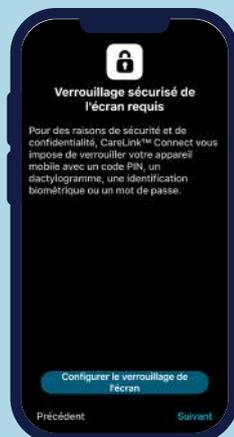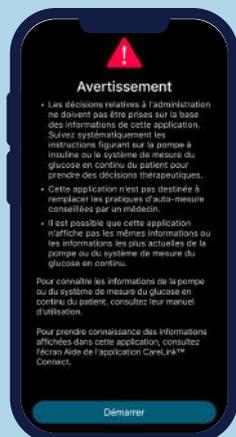

5


Le partenaire de soins saisit le nom d'utilisateur du compte CareLink™ Personal (fourni par le patient) pour envoyer une demande de suivi.

Le patient doit accepter la demande dans un délai de 24 heures via son application smartphone ou depuis un navigateur Web sur le site www.carelink.minimed.eu

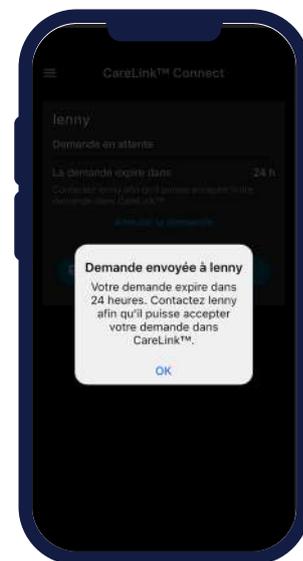


L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT

LES ÉCRANS

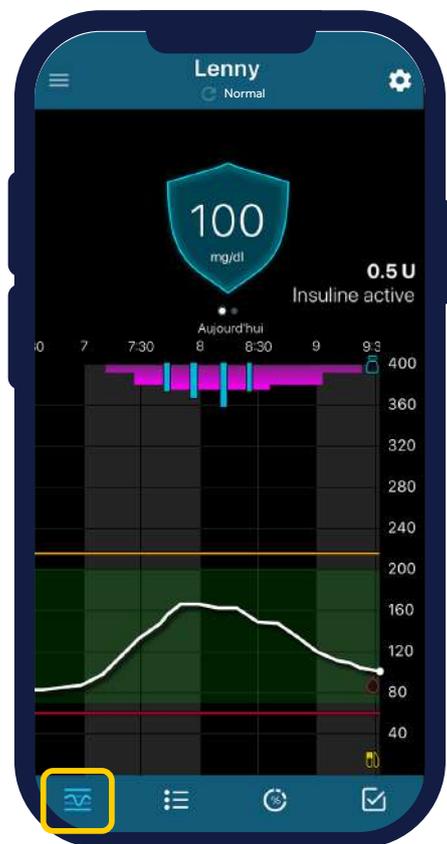


ÉCRAN D'ACCUEIL

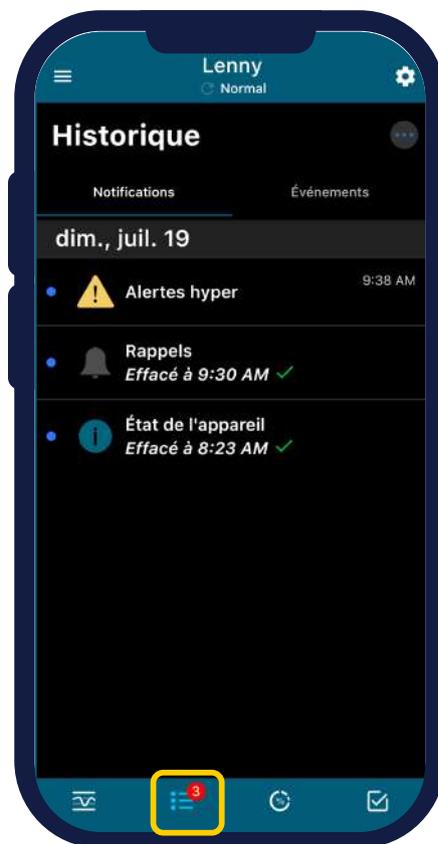

HISTORIQUE

L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT

LES ÉCRANS

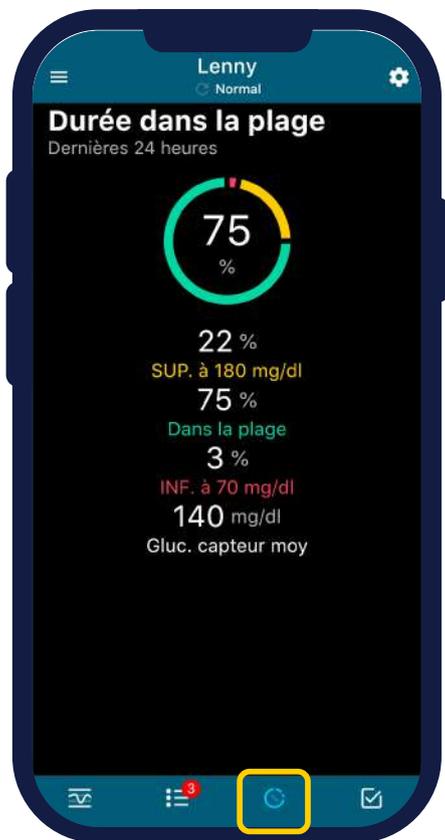

**TEMPS PASSÉ
DANS LA CIBLE (TIR*)**




ÉTAT DE L'APPAREIL
(niveau de pile de la pompe,
du capteur etc.)

*TIME IN RANGE

L'APPLICATION CARELINK™ CONNECT

LES NOTIFICATIONS

Vous pouvez sélectionner les alertes que vous souhaitez recevoir.

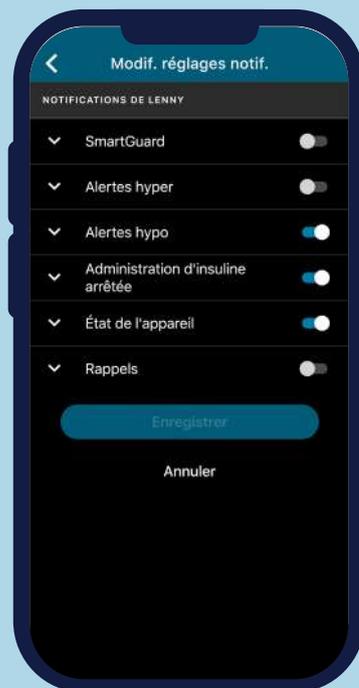

LES MENUS

Ils sont accessibles depuis l'écran d'accueil en cliquant sur cette icône :





CareLink Perso™ est un dispositif médical de classe I.
CareLink™ est le logiciel de téléchargement des données dans le traitement du diabète par pompe à insuline.
Lire attentivement la notice du produit avant chaque utilisation.
Réservé aux professionnels de santé.

L'application CareLink™ Connect est destinée à fournir un affichage secondaire des données de la pompe à insuline et de CGM sur un appareil mobile compatible.

L'application CareLink™ Connect n'est pas destinée à remplacer l'affichage en temps réel des données de la pompe à insuline ou de CGM sur l'appareil d'affichage principal. Toutes les décisions liées à la thérapie doivent reposer sur l'appareil d'affichage principal.

L'application CareLink™ Connect n'est pas destinée à analyser ou à modifier les données de la pompe à insuline et de CGM qu'elle reçoit. Elle n'est pas non plus censée contrôler les fonctions du système de pompe à insuline ou de CGM auquel elle est connectée.

L'application CareLink™ Connect n'est pas destinée à recevoir directement des informations du système de pompe à insuline ou de CGM.

Medtronic

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr
www.parlonsdiabete.com

dreamed
diabetes ai

Dreamed Diabetes est une marque commerciale de DreaMed Diabetes, Ltd. L'algorithme du système MiniMed™ 780G inclut des technologies développées par Dreamed Diabetes.