

Medtronic



Łatwiej, szybciej,
bezproblemowo^{1*}

Zestaw infuzyjny MiniMed™ Mio™ Advance

Każdy zestaw zawiera jednorazowy aplikator, aby
wymiana zestawu przebiegała szybciej i łatwiej, a samo
założenie wymagało mniejszej liczby czynności.^{1,2,*}

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie
z instrukcją używania lub etykietą.

Łatwiejsze wymiany zestawów. Mniej skomplikowany proces założenia.¹

Założenie zestawu MiniMed™ Mio™ Advance wymaga mniejszej liczby czynności,^{1,2,*} więc łatwiej jest zapamiętać kolejność postępowania. Ponadto igła jest niewidoczna podczas całego procesu zakładania zestawu.

85%

użytkowników
uważa, że założenie
zestawu przebiega
szybko¹

95%

użytkowników
przyznaje, że
założenie zestawu
jest łatwe¹

85%

użytkowników
zgadza się,
że wymiany
zestawu są
bezproblemowe¹



1 Usunąć papierową
osłonę plastra



2 Chwyć i wysuń
zabezpieczenie



3 Przyłóż do ciała



4 Naciśnij przycisk

Cechy zestawu MiniMed™ Mio™ Advance ułatwiające jego używanie

Zawiera wszystkie niezbędne elementy – nie wymaga przygotowań

Wbudowany jednorazowy aplikator

Zakładany pod kątem 90°

Niewidoczna igła podczas całego procesu zakładania zestawu



Pamiętaj o rotacji miejsc zakładania zestawów infuzyjnych

Regularna zmiana miejsc zakładania zestawu zapewnia stabilne wchłanianie insuliny oraz jest wskazana dla utrzymania prawidłowego zdrowia skóry³. Czasem jednak proces ten może sprawiać trudności. Dlatego zestaw MiniMed™ Mio™ Advance został zaprojektowany tak, aby zakładanie było łatwe, nawet w najtrudniej dostępnych miejscach^{1, 2, *}. Zestaw wyposażony jest w jednorazowy aplikator, całość dobrze leży w dłoni, a w celu założenia zestawu wystarczy nacisnąć jeden przycisk.

80% użytkowników stwierdza, że zestaw ten można łatwo założyć również w trudno dostępnych miejscach¹

Łatwa zmiana na lepsze

Jest to jeden z naszych najłatwiejszych w zakładaniu zestawów infuzyjnych, według trenerów i pacjentów¹. Zestaw zawiera jednorazowy aplikator, który jednocześnie skutecznie zasłania igłę podczas całego procesu zakładania, a samo założenie wymaga mniejszej liczby czynności do wykonania^{1,2,*}. To świetne rozwiązanie dla osób, które obawiają się widoku igły oraz mają trudności z zakładaniem zestawu.

Porozmawiaj ze swoim zespołem terapeutycznym lub przedstawicielem firmy Medtronic, aby uzyskać więcej informacji o zestawie infuzyjnym MiniMed™ Mio™ Advance.



Kod produktu (opakowanie 10 szt.)	Długość kaniuli (mm)	Długość drenu (cm)
MMT - 242A	6	60
MMT - 213A	6	110
MMT - 243A	9	60
MMT - 244A	9	110

Piśmiennictwo:

1. Dane własne firmy Medtronic. Minimed™ Mio™ Advance Usability Study 10619721 DOC, 2017
 2. Medtronic Minimed™ Mio™ Advance Instruction For Use Comparison versus MiniMed™ Quick Set™.
 3. AADE. Insulin Pump Therapy: Best practices in choosing and using infusion devices. American Association of Diabetes Educators. 2011.
- * W porównaniu z zestawem infuzyjnym MiniMed™ Quick-Set™

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Stosowanie zestawów infuzyjnych jest wskazane do podskórnego podawania leków, w tym insuliny, za pomocą pomp insulinowych. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności oraz możliwych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w instrukcji obsługi. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic i/lub na stronie firmy Medtronic, pod adresem <https://www.medtronic-diabetes.com/pl-PL/>.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią porady medycznej i nie powinny zastępować porady w gabinecie lekarskim. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności, potencjalne zdarzenia niepożądane oraz wszelkie inne informacje należy omówić ze swoim lekarzem.

Zestaw infuzyjny MiniMed Mio Advance jest wyposażony w nachyloną pod kątem 90 stopni miękką kaniulę. Jest dostarczany gotowy do użytku włożony do urządzenia do wprowadzania wyposażonego w automatycznie cofającą się igłę. Urządzenie jest dostarczane sterylne i niepirogenne. Zestaw infuzyjny jest przeznaczony do podskórnego podawania insuliny w leczeniu cukrzycy. Zestaw infuzyjny został przetestowany jako zgodny z insuliną zatwierdzoną do wlewu podskórnego.

Uwaga: Reklama nie jest kierowana do dzieci.

Materiał reklamowy Medtronic Poland sp. z o.o. Producent: Medtronic MiniMed USA
© 2022 Medtronic. PL-CGM-2300007

Medtronic

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

Całodobowa infolinia: 22 46 56 987

<https://www.medtronic-diabetes.com/pl-PL/>

Medtronic i logo firmy Medtronic są znakami towarowymi firmy Medtronic. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi spółek firmy Medtronic. Oficjalnym producentem zestawów infuzyjnych Medtronic jest firma Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted, 4320 Lejre, Dania.

PL-CGM-2300007 © 2022 Medtronic.

Wszelkie prawa zastrzeżone.