



MINIMED™ 780G-SYSTEMET

LADDA UPP TILL CARELINK™ PERSONAL

Enkelt att använda, enkelt att dela.

HA ALLTING REDO



- Ha den blå adaptern till hands
- Gå till **carelink.minimed.eu** på din bärbara dator
- Välj Sverige som din region
- Logga in på ditt konto eller skapa ett konto



SÄKERSTÄLL ATT DIN PUMP ÄR REDO FÖR UPPLADDNING

Kontrollera att pumpen inte visar någon av följande skärmar.

- ☐ Aktiva larm
- ☐ Lågt batteri

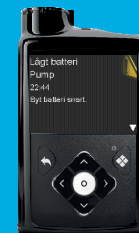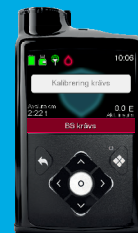


Medtronic

MINIMED™ 780G-SYSTEMET

UPPLADDNING FRÅN DIN PUMP

www.carelink.minimed.eu

LOGGA IN PÅ DITT KONTO FÖR ATT ANSLUTA PUMPEN

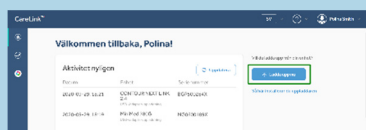


- 1 Klicka på "Ladda upp nu" och vänta tills skärmen för uppladdaren visas.

FÖRSTA UPPLADDNINGEN



- 2 Välj "Lägg till ny enhet".

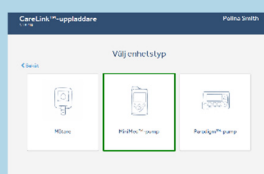

- 3 Välj "MiniMed™-pump".



- 4 Välj din pumptyp. Om du är osäker på vilken pumptyp du har klickar du på "Hjälp mig identifiera pumpen".




- 5 Anslut den blå adaptorn och följ avsnittet "Ladda upp data" nedan.

EFTERFÖLJANDE UPPLADDNINGAR




- 2 Välj enheten från vilken du vill ladda upp data på skärmen "Välj typ av enhet".

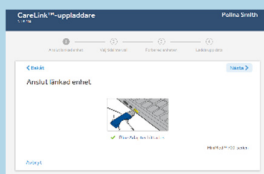


- 3 Anslut den blå adaptorn för att ladda upp data enligt avsnittet "Ladda upp data" nedan.

LADDA UPP DATA

Tips: välj gärna senaste 2 veckorna för att minska uppladdningstid.

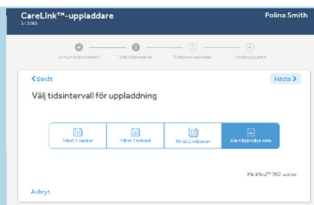

- 1 Välj tidsperiod för uppladdning.

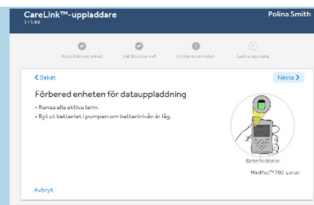

- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att förbereda enheten för uppladdning av data.



- 3 Ange din pumps serienummer. Parkoppling krävs för varje uppladdning.



- 4 Välj "Ladda upp nu" på pumpen.



- 5 Vänta tills uppladdningen är klar.



- 6 Uppladdningen har slutförts.

PERSONALISERADE DIABETESINSIKTER FÖR ATT STÖDJA DINA BEHANDLINGSBESLUT

Medtronic AB
Gustav III:s Boulevard 42 169 73 Solna
Sverige
08-56858520

www.medtronic-diabetes.se

Säkerhetsinformation: CareLink™-programvaran
CareLink™-programvaran är avsedd att användas som ett tilläggsverktyg för diabeteshantering och ska INTE betraktas som en tillförlitlig informationskälla i sig. Se enhetens manual för detaljerad information om bruksanvisningar, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och eventuella biverkningar.

UC202105900 SV © 2020 Medtronic. Med ensamrätt. Medtronic, Medtronic-logotypen och Further, Together är varumärken som tillhör Medtronic. Alla andra märken är varumärken som tillhör ett Medtronic-företag.