


# Tout savoir sur l'application MiniMed™ Mobile

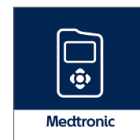




# Tout savoir sur l'application MiniMed™ Mobile



1. Téléchargez l'application, ouvrez-la, puis suivez les instructions à l'écran.
2. Connectez-vous à votre compte CareLink™ Personal. Si vous ne possédez pas encore de compte, inscrivez-vous.
3. Suivez les instructions à l'écran pour appairer l'application avec votre pompe de la série MiniMed™ 700.
4. Lisez l'écran d'avertissement et acceptez en appuyant sur **OK**, puis sur **Accepter**.

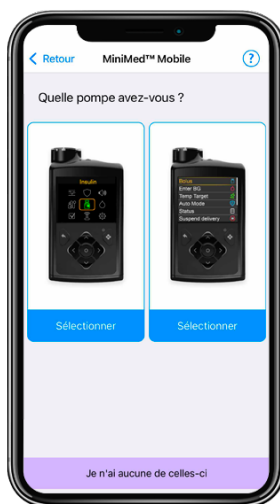

Surveillez votre téléphone pour ne pas rater les demandes d'appairage.



Les mises à jour automatiques des systèmes d'exploitation mobiles doivent également être désactivées. Si une mise à jour est disponible, consultez le site web local avant de l'installer pour savoir si elle est prise en charge.

## Navigation dans l'application


### Sync vers CareLink™

Cette fonctionnalité vous permet de gérer les données transmises à CareLink™ Personal. Activez le téléchargement automatique ou appuyez sur Télécharger maintenant pour transmettre toutes les données de votre pompe MiniMed™. Vous pouvez également gérer vos partenaires de soins dans ce menu.

Appuyez sur les trois barres pour accéder au menu.

Mesure actuelle du capteur

Informations relatives à l'administration d'insuline

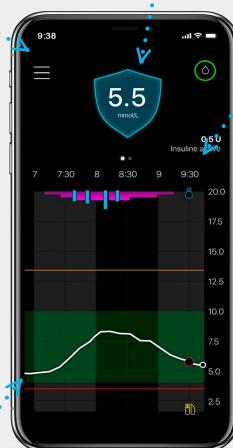

Tracé du capteur. Vous pouvez appuyer sur les événements du graphique pour afficher plus de détails.

Balayez vers la gauche pour accéder à l'écran Durée dans la cible.

Vous voulez afficher les images lors de l'appairage du système MiniMed™ 780G et d'un téléphone compatible? Recherchez votre appareil sur [medtronic-diabetes.com/fr-CH](http://medtronic-diabetes.com/fr-CH)

# Installation de MiniMed™ Mobile sur votre Apple® Watch

1. Assurez-vous que votre Apple® Watch et votre iPhone soient connectés. Vous pouvez le vérifier dans vos paramètres Bluetooth®. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions disponibles sur cette page: <https://support.apple.com/en-mn/guide/watch/apdde4d6f98e/watchos>.
2. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'application MiniMed™ Mobile sur l'App Store pour l'installer sur votre iPhone.
3. Vous aurez ensuite besoin de l'application complémentaire sur votre Apple® Watch. Si elle ne s'installe pas automatiquement, vous pouvez le faire manuellement de **deux manières**.

## A. Obtenir l'application via votre Apple® Watch.



- A. Appuyez sur le bouton Digital Crown pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **App Store**.
- B. Appuyez sur **Rechercher**, puis entrez «MiniMed Mobile».
- C. Trouvez la bonne application à l'aide de cette icône, puis appuyez sur **Obtenir**.



## B. Obtenir l'application via votre iPhone.



- A. Sur votre iPhone, ouvrez l'application Watch.
- B. Appuyez sur l'onglet **Ma montre**.
- C. Appuyez sur **Installer** à côté de l'application MiniMed™ Mobile.


# Application MiniMed™ Mobile (Apple Watch®)

L'application MiniMed™ Mobile et le système de pompe MiniMed™ 780G sont également compatibles avec l'Apple® Watch\*. Affichez vos valeurs directement sur le cadran de votre montre ou appuyez pour accéder à l'application.



**Remarque:** les notifications peuvent être **ignorées** sur votre appareil mobile, mais elles doivent être **effacées** sur la pompe. Elles ne peuvent être ni ignorées ni effacées sur la montre.

L'application mobile dispose également d'une option de menu pour l'application montre. Elle peut par exemple vous indiquer si votre montre ou votre pompe est incompatible ou si l'application n'est pas installée sur la montre.\*\*

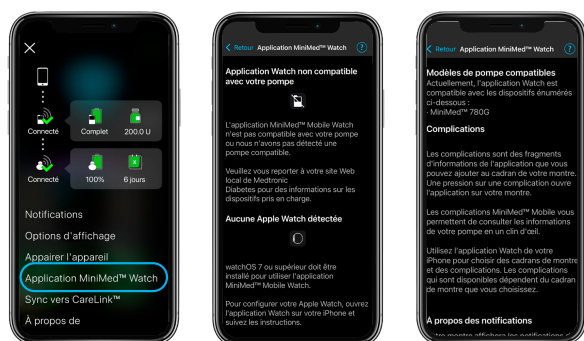

\* Consultez le site web local pour obtenir la liste des appareils compatibles avec l'Apple® Watch et la pompe MiniMed™.

\*\* Si le téléphone est configuré par défaut pour ne pas télécharger les applications complémentaires.

# Application MiniMed™ Mobile

Apple Watch – Recevoir des notifications.

S'assurer que l'option Recopie de l'Apple Watch est active.

Sur votre iPhone, accédez à l'application de votre Apple Watch.

Appuyez sur **Notifications**.

Faites défiler la liste jusqu'à l'alerte "recopie".

Une fois l'app MiniMed™ Mobile trouvée, assurez-vous qu'elle est **active**.



**Rappel:**  
si l'iPhone est déverrouillé, les notifications ne sont pas envoyées à l'Apple Watch. En effet, les notifications ne sont reçues sur l'Apple Watch que si l'iPhone est verrouillé ou en veille.

## Options d'accessibilité

L'application MiniMed™ Mobile est-elle trop difficile à distinguer sur votre Apple Watch? Vous pouvez ajouter différentes complications au cadran de votre Apple Watch pour qu'elle soit plus facile à repérer. Voici les étapes à suivre.

1. Sur le cadran de l'Apple Watch, touchez l'écran maintenez appuyé, puis pressez Modifier.
2. Balayez complètement vers la gauche, puis appuyez sur les complications que vous souhaitez utiliser.
3. Utilisez la Digital Crown pour faire défiler les options. L'application MiniMed™ Mobile présente trois complications pouvant être utilisées. Choisissez celle qui vous convient le mieux\*: 1. Extra large, 2. Modulaire large, 3. Utilitaire large



\*toutes les montres ne prennent pas en charge toutes les complications.

# Foire aux questions sur l'application MiniMed™ Mobile

## De quoi ai-je besoin pour utiliser l'application MiniMed™ Mobile?

Une pompe à insuline Medtronic MiniMed™ 780G, un smartphone compatible\* (sur lequel on peut télécharger des applications), un compte CareLink™ Personal et une connexion internet sont nécessaires pour utiliser l'application MiniMed™ Mobile.

## Mes partenaires de soins peuvent-ils consulter mes données et recevoir des alertes/notifications?

Oui, ils peuvent télécharger l'application CareLink™ Connect sur un appareil mobile compatible\*. Ils auront besoin de votre nom d'utilisateur CareLink™ Personal pour effectuer la configuration. Vos partenaires de soins peuvent également définir des alertes SMS sur le site web de CareLink™ Personal. Jusqu'à cinq partenaires de soins peuvent consulter vos données.

## Mon professionnel de santé peut-il consulter mes données?

Oui, mais il ne peut ni recevoir d'alertes ou de notifications ni consulter les données en direct. Assurez-vous que la fonctionnalité **Sync vers CareLink™** est activée sur votre application MiniMed™ Mobile et que votre compte CareLink™ Personal est lié au compte du système CareLink™ de votre professionnel de santé. Votre professionnel de santé aura alors accès à vos données en cas de besoin sans qu'aucune action ne soit requise de votre part.

## Une mise à jour est disponible pour mon téléphone mobile. Dois-je l'effectuer?

Pas immédiatement. Assurez-vous que les mises à jour automatiques sont désactivées sur votre appareil mobile. Effectuez la mise à jour manuellement uniquement une fois que Medtronic aura confirmé la compatibilité de l'application MiniMed™ Mobile avec cette mise à jour de votre téléphone.

## Une mise à jour de l'application MiniMed™ Mobile est disponible. Dois-je l'effectuer?

Oui. Les nouvelles versions de l'application MiniMed™ Mobile peuvent être utilisées immédiatement. Nous encourageons les utilisateurs à toujours utiliser la version la plus récente.

## Je n'arrive pas à appairer l'application MiniMed™ Mobile avec ma pompe.

Dans les paramètres de votre téléphone, assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée. Supprimez toutes les pompes précédemment appairées. Assurez-vous que la pompe et le téléphone se trouvent à moins de 3 m l'un de l'autre, puis réessayez. Si le problème persiste, veuillez contacter l'assistance téléphonique Medtronic Diabetes locale.

## J'ai une pompe à insuline Medtronic autre que le système MiniMed™ 780G. Puis-je utiliser mon Apple® Watch?

Non. L'Apple® Watch peut uniquement être employée par les personnes utilisant l'application MiniMed™ Mobile avec le système MiniMed™ 780G.

## Une application pour montre Android est-elle disponible?

Non. À l'heure actuelle, seule la version Apple est disponible.

## Puis-je consulter mes données sur l'Apple® Watch sans mon téléphone?

Non. Votre montre affichera les données que votre téléphone reçoit de la pompe. Elle ne sera pas appairée directement avec votre pompe.

\*Veuillez consulter le site web Medtronic Diabetes local pour obtenir toutes les informations relatives à la compatibilité des différents dispositifs.



Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un avis médical et ne doivent pas se substituer à une consultation chez votre médecin. Abordez les indications, contre-indications, avertissements, précautions, effets indésirables potentiels et toute autre information avec le professionnel de santé qui assure votre prise en charge.

# Medtronic

**Europe**  
Medtronic International Trading Sàrl.  
Route du Molliau 31  
Case postale  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)  
Tél.: +41 (0)21 802 70 00  
Fax: +41 (0)21 802 79 00

EMEA-SOF-2300008. ©2023 Medtronic. Medtronic, le logo Medtronic et Engineering the extraordinary sont des marques commerciales de Medtronic. Les marques tierces sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société de Medtronic.

[medtronic.eu](http://medtronic.eu)