

CareLink™-lataussovelluksen asentaminen


Jotta voit ladata laitteen tiedot manuaalisesti CareLink™ Personal -ohjelmistoon, sinun tulee asentaa CareLink™-lataussovellus tietokoneellesi.

Jos et käytä MiniMed™ Mobile -sovellusta, sinun tulee ladata manuaalisesti MiniMed™-insuliinipumppusi tiedot tietokoneelle raporttien tarkastelua varten. Tätä varten sinun tulee asentaa tietokoneelle CareLink™-lataussovellus seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Huom! Varmista, että sinulla on tietokoneesi järjestelmänvalvojan oikeudet. Irrota kaikki USB-liitännät ennen lataussovelluksen asentamista.

1

Kirjaudu tietokoneellasi sisään ohjelmistoon osoitteessa carelink.minimed.eu. Valitse päävalikosta **Lataussovelluksen asennus**.

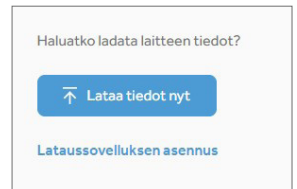


2

Napsauta **Lataa CareLink™-lataussovelluksen asennusohjelma** ladataksesi asennustiedoston. Kun tiedosto on latautunut, avaa ja suorita .exe-tiedosto.




3

Valitse asennuskieli alavetovalikosta ja napsauta **OK**.

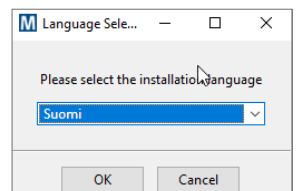


4

Valitse **tervetuloruudusta** ja **Valmis asentamaan** -ruudusta **Seuraava**.

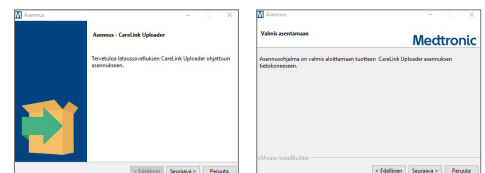

5


Asennus alkaa. Napsauta pyydettyä **Valmis viimeistelläksesi** asennuksen.

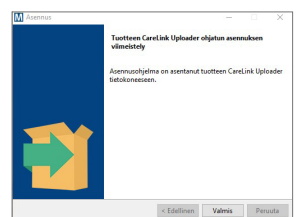


MiniMed™-insuliinipumpun tietojen manuaalinen lataaminen

Napsauta CareLink™ Personal -ohjelmistossa **Lataa tiedot nyt** -painiketta. Kun lataussovellus avautuu, seuraa seuraavia vaiheita:

1. Valitse laite, jonka tiedot haluat ladata

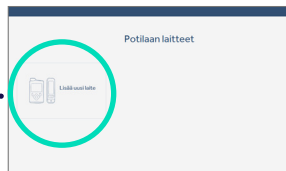


Valitse
Lisää uusi laite

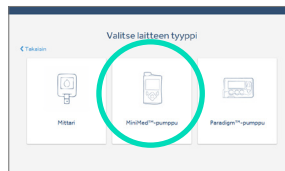

Valitse
MiniMed™-pumppu




Valitse pumpun tyyppi. Jos et ole varma, napsauta **Automaattitunnistamaan pumpun tyyppi**.

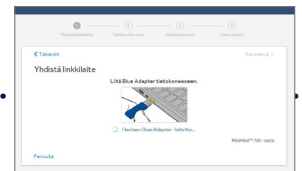


Yhdistä sininen sovitin pyydettäessä

2. Valitse ladattavien tietojen aika-alue

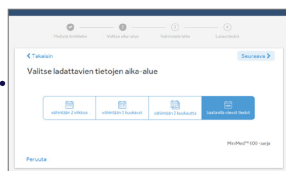


Valitse aikaväli, jonka ajalta haluat ladata laitteen tiedot. Huomaa, että pidempi aikaväli tai harvemmin ladatut tiedot johtavat pidempään latausaikaan.


3. Valmistele laite tietojen latausta varten

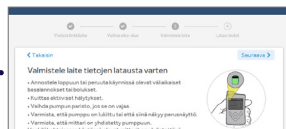

Seuraa näytön ohjeita laitteen valmistelusta

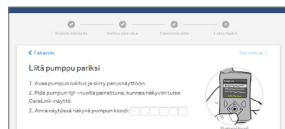

Liitä pumppu pariin syöttämällä pumpun näytössä näkyvä koodi

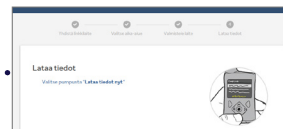


Valitse pyydettäessä pumpusta **Lataa tiedot nyt**



Odota, että tietojen lataus on valmis

4. Tietojen lataus on valmis

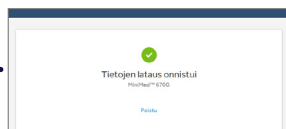

Tietojen lataus onnistui
-ilmoitus tulee näkyviin

5. Seuraavat tietojen latauskerrat



Pumput, joiden tietoja olet ladannut aiemmin, näkyvät lataussovelluksen etusivulla. Ohita pumpun pariin liittämisen vaiheet valitsemalla aiemmin ladattu pumpu listalta.

Medtronic

Medtronic Finland Oy
Lentäjätie 3
01530 Vantaa
Puh. +358 20 728 1200

www.medtronic.fi
www.medtronic-diabetes.fi

Tämän materiaalin sisältämiä tietoja ei tule pitää lääketieteellisinä neuvoina eivätkä ne korvaa keskustelua lääkärin kanssa. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varoimista, mahdollisista haittatapahtumista ja muista asioista. Lisätietoja saat Medtronicin paikalliselta edustajalta tai käyttöoppaasta.

FI-SOF-2300008 © Medtronic 2023. Kaikki oikeudet pidätetään. Medtronic ja Medtronic-logo ovat Medtronic-yrityksen tavaramerkkejä. ™*Kolmannen osapuolen tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä.