


# Erste Schritte mit der MiniMed™ Mobile App



# Erste Schritte mit der MiniMed™ Mobile App



1. Laden Sie die App herunter, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Melden Sie sich in Ihrem CareLink™ Personal Konto an. Oder registrieren Sie sich bei CareLink™ Personal, wenn Sie noch kein Konto besitzen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App mit Ihrer MiniMed™ Insulinpumpe zu koppeln.
4. Lesen Sie die Warnhinweise auf dem Bildschirm und akzeptieren Sie, indem Sie auf **OK** und dann auf **Stimme zu** tippen.

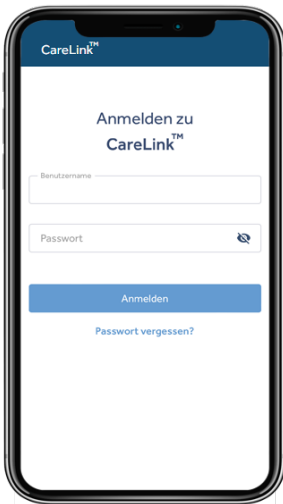

Vergessen Sie nicht, Ihr Telefon auf Anfragen zur Gerätekopplung zu kontrollieren.



Automatische Software Updates für Mobilgerät-Betriebssysteme sollten deaktiviert werden. Falls ein Software Update vorliegt, prüfen Sie vor der Installation auf Ihrer lokalen Website, ob die neue Software Version bereits kompatibel ist.

## Navigieren in der App


### CareLink™ Synchronisation

Hier können Sie Ihre Einstellungen zum Hochladen von Daten in CareLink™ Personal verwalten. Schalten Sie das automatische Hochladen ein oder tippen Sie auf „Jetzt hochladen“, um alle Daten in Ihrer MiniMed™ Pumpe hochzuladen. In diesem Menü können Sie auch Ihre Vertrauenspersonen verwalten

Zum Aufrufen des Menüs auf die drei Balken tippen

Aktueller Sensorglukosewert

Informationen zur Insulinabgabe

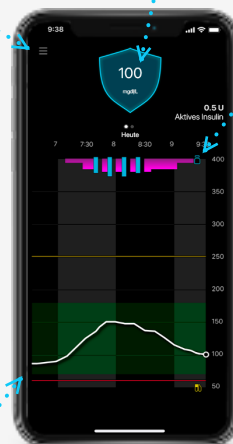

Sensorverlaufskurve. Für Details in der Grafik auf das jeweilige Ereignis tippen.

Nach links wischen, um „Zeit im Zielbereich“ anzuzeigen

Die hier dargestellten Bilder entsprechen der Kopplung des MiniMed™ 780G Systems mit einem kompatiblen Mobilgerät. Prüfen Sie hier, ob ihr Mobilgerät kompatibel ist: <https://www.medtronic-diabetes.com/de-DE/app-kompatibilitaet>

# Installation der MiniMed™ Mobile App auf Ihrer Apple® Watch


1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Apple® Watch und Ihr iPhone miteinander gekoppelt sind. Sie können Ihre Bluetooth®-Einstellungen überprüfen und <https://support.apple.com/en-mn/guide/watch/apdde4d6f98e/watchos> aufrufen, wenn dies nicht der Fall sein sollte.
2. Laden Sie die MiniMed™ Mobile App aus dem App Store auf Ihr iPhone herunter, sofern Sie dies noch nicht gemacht haben.
3. Als Nächstes benötigen Sie die App auf Ihrer Apple® Watch. Sollte dies nicht automatisch erfolgen, gibt es **zwei Möglichkeiten**, dies manuell nachzuholen.

## A. Die App über Ihre Watch herunterladen



- A. Rufen Sie durch Drücken der Digital Crown/Home-Taste den Startbildschirm auf und tippen Sie dann auf den **App Store**.
- B. Tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie „MiniMed Mobile“ ein.
- C. Suchen Sie die richtige App mit diesem Symbol und tippen Sie auf **Laden**.

## B. Die App über Ihr iPhone herunterladen

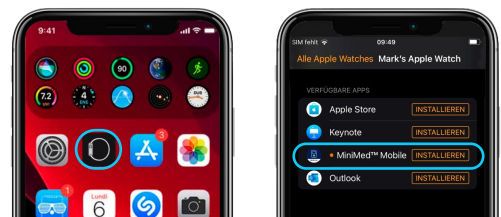


- A. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Watch App.
- B. Tippen Sie auf die Registerkarte **Meine Watch**.
- C. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Installieren** neben der MiniMed™ Mobile App.



# MiniMed™ Mobile App (Apple Watch®)

Die MiniMed™ Mobile App mit den MiniMed™ 780G Pumpensystemen ist auch mit der Apple® Watch\* kompatibel. Ihre Werte können Sie auf dem Zifferblatt Ihrer Uhr einsehen oder durch Antippen, wodurch sich die App öffnet.

Die iPhone App hat auch eine Menüoption für die Watch App. Die App kann Ihnen beispielsweise mitteilen, wenn Ihre Watch bzw. Pumpe nicht kompatibel ist oder wenn die App auf der Watch fehlt.\*\*

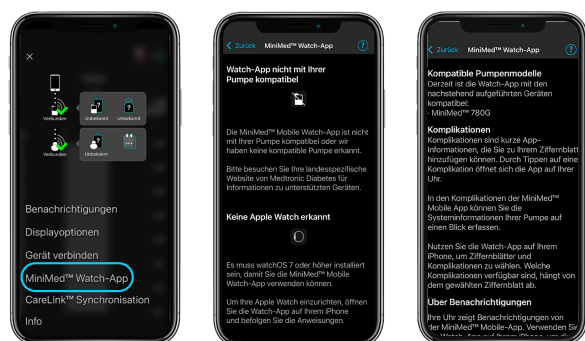

**Hinweis:** Benachrichtigungen können auf Ihrem Mobilgerät **gelöscht** werden, müssen aber auf der Pumpe **bestätigt** werden. Sie können auf der Watch weder bestätigt noch gelöscht werden.

\* Rufen Sie <https://www.medtronic-diabetes.com/de-DE/app-kompatibilitaet> auf, um herauszufinden, welche Geräte von der Apple® Watch und der MiniMed™ Pumpe unterstützt werden.

\*\*Wenn die Standardeinstellung auf dem iPhone so festgelegt wurde, dass keine Begleitwendungen heruntergeladen werden können.

# MiniMed™ Mobile App

Apple Watch - Erhalt von Benachrichtigungen.

Achten Sie darauf, dass die Spiegelung aktiviert ist.

Öffnen Sie auf dem iPhone die Apple Watch App.

Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**.

Gehen Sie zur Liste **iPhone-Hinweise spiegeln von:** suchen Sie die MiniMed™ Mobile App und stellen Sie sicher, dass sie **aktiviert** ist.



**Zur Erinnerung:**  
Bei entsperrem iPhone werden die Benachrichtigungen nicht an die Apple Watch weitergeleitet. Die Apple Watch empfängt nur dann Benachrichtigungen, wenn das iPhone gesperrt ist oder sich im Ruhezustand befindet.

## Zugang zur App

Ist die MiniMed™ Mobile App auf Ihrer Apple Watch nur schwer zu erkennen? Sie können dem Zifferblatt Ihrer Watch verschiedene Komplikationen hinzufügen, um es übersichtlicher zu gestalten - so funktioniert das:

1. Berühren und halten Sie bei angezeigtem Zifferblatt das Display und tippen Sie dann auf Bearbeiten.
2. Wischen Sie nach links und tippen Sie auf die Komplikation, die Sie nutzen möchten.
3. Blättern Sie mit der Digital Crown/Home-Taste durch die Optionen. Die MiniMed™ Mobile App verfügt über drei mögliche Komplikationen; wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihnen passt\*: 1. Extra groß, 2. Modular, 3. Utility



Näheres hierzu finden Sie unter [www.medtronic-diabetes.de](http://www.medtronic-diabetes.de)

\*nicht alle Watches unterstützen alle Komplikationen

# Häufig gestellte Fragen zur MiniMed™ Mobile App

## Was benötige ich, um die MiniMed™ Mobile App nutzen zu können?

Für die Nutzung der MiniMed™ Mobile App sind eine Medtronic MiniMed™ 780G Insulinpumpe, ein kompatibles\* Smartphone, ein Konto bei CareLink™ Personal und eine Internetverbindung erforderlich.

## Können meine Vertrauenspersonen meine Daten einsehen und Warnmeldungen/Benachrichtigungen erhalten?

Ja, sie können die CareLink™ Connect App auf ein kompatibles\* Mobilgerät herunterladen und benötigen dazu Ihren Benutzernamen für CareLink™ Personal, um die Konfiguration abzuschließen. SMS-Benachrichtigungen können auch von Vertrauenspersonen auf der CareLink™ Personal Website eingerichtet werden. Ihre Daten können von maximal 5 Vertrauenspersonen eingesehen werden.

## Können meine behandelnden Ärzt\*innen meine Daten einsehen?

Ja, allerdings können sie keine Warnmeldungen und Alarme empfangen oder Live-Daten einsehen. Achten Sie darauf, dass in Ihrer MiniMed™ Mobile App die Funktion **Synchronisierung mit CareLink™** aktiviert ist und Ihr Konto bei CareLink™ Personal mit dem Konto Ihrer behandelnden Ärzt\*innen in CareLink™ System verknüpft ist. Ihre Ärzt\*innen können dann bei Bedarf auf Ihre Daten zugreifen, ohne dass Sie etwas veranlassen müssen.

## Für mein Mobilgerät ist ein neues Software Update verfügbar. Soll ich es installieren?

Nicht sofort. Bitte achten Sie darauf, dass automatische Software Updates auf Ihrem Mobilgerät deaktiviert sind und aktualisieren Sie das Gerät erst dann manuell, wenn Medtronic die Kompatibilität der MiniMed™ Mobile App mit dem neuen Smartphone-Update bestätigt hat.

## Für die MiniMed™ Mobile App ist eine Aktualisierung verfügbar. Soll ich sie aktualisieren?

Ja. Neue Versionen der MiniMed™ Mobile App können sofort verwendet werden. Wir empfehlen, stets mit der aktuellsten verfügbaren Version zu arbeiten.

## Ich habe Probleme, die MiniMed™ Mobile App mit meiner Pumpe zu koppeln.

Achten Sie darauf, dass in den Einstellungen Ihres Smartphones Bluetooth® eingeschaltet ist. Löschen Sie alle zuvor gekoppelten Pumpen, stellen Sie sicher, dass Pumpe und Telefon nicht mehr als 3 Meter voneinander entfernt sind, und versuchen Sie es erneut. Sollte das Problem weiterbestehen, wenden Sie sich bitte an unsere 24/7 Service Hotline unter 0800-6464633 (Auswahl 1).

## Ich habe zwar eine Insulinpumpe von Medtronic, doch handelt es sich dabei nicht um das System MiniMed™ 780G. Kann ich dennoch die Apple® Watch verwenden?

Nein. Die Apple® Watch kann nur von Benutzer\*innen mit der MiniMed™ Mobile App und dem MiniMed™ 780G System verwendet werden.

## Gibt es eine App für Android Watches?

Nein, derzeit gibt es nur die Apple-Version

## Kann ich meine Daten mit der Apple® Watch, aber ohne mein iPhone, sehen?

Nein. Ihre Watch zeigt Ihnen die Daten an, die Ihr iPhone von der Pumpe empfängt. Ihre Watch kann nicht direkt mit Ihrer Pumpe gekoppelt werden.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine medizinische Beratung dar und sollten keinesfalls als Alternative für ein Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt betrachtet werden. Besprechen Sie Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, potenzielle Nebenwirkungen und alle weiteren Informationen mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

# Medtronic

**Deutschland**  
Medtronic GmbH  
Earl-Bakken-Platz 1  
DE-40670 Meerbusch  
deutschland@medtronic.com  
Telefon: +49 (0)2159 81 49 0  
Telefax: +49 (0)2159 81 49 100

DE-IPT-2300038. ©2023 Medtronic. Medtronic, das Medtronic Logo und Engineering the extraordinary sind Marken von Medtronic. Die Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle anderen Marken sind Marken eines Medtronic Unternehmens. Gedruckt in Europa.

[www.medtronic.de](http://www.medtronic.de)