

# ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΕΑ Εφαρμογή Φόρτωσης CareLink™ Personal

Ανεβάστε τα δεδομένα σας για  
ευκολότερη συνεργασία με το γιατρό σας.

**ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ  
ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΕΙΣ ΣΤΟ  
ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ  
ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ  
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ  
ΣΤΟ CARELINK™**



Κατανοήστε το  
γλυκαιμικό σας προφίλ




Φορτώστε τα  
δεδομένα σας τακτικά



Συνεργαστείτε  
με το γιατρό σας

**ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ  
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΗΨΗ  
ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΝΕΟΥ  
UPLOADER**


Κάντε λήψη της εφαρμογής, μία  
μόνο φορά, σε κάθε υπολογιστή  
που επιθυμείτε να φορτώσετε τη  
συσκευή σας

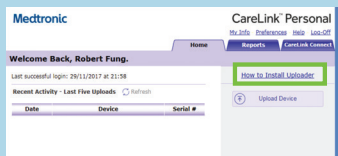

- 1 Συνδεθείτε
  - Κάντε κλικ στο "Πως να εγκαταστήσετε την εφαρμογή φόρτωσης"




- 2 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο λήψης της εφαρμογής και επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

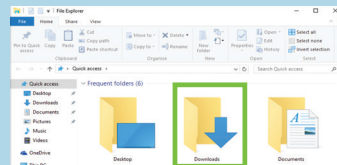


- 3 Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο. Ανοίξτε το αρχείο και επιλέξτε "Εκτέλεση"


**ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ,  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ  
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΦΟΡΤΩΣΗΣ**

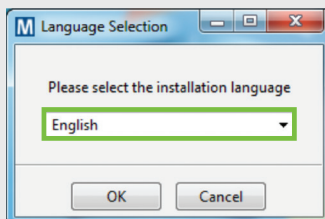


- 1 Επιλέξτε γλώσσα

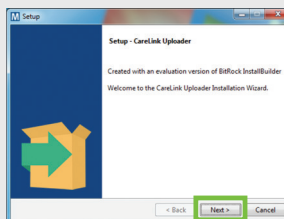

- 2 Κάντε κλικ στο "Επόμενο"

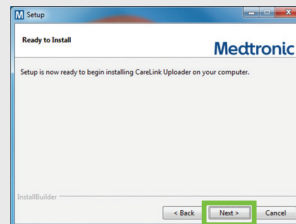

- 3 Κάντε κλικ στο "Επόμενο"

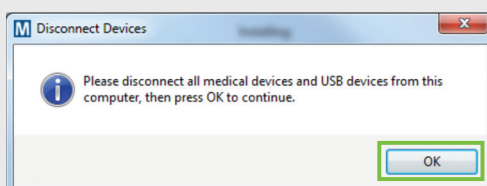

- 4
  - Βεβαιωθείτε πως το CareLink™ USB ή ο μετρητής σας δεν είναι συνδεδεμένα και κάντε κλικ στο "ΟΚ"
  - Κάντε κλικ στο "Τέλος" για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση

**ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ  
ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ**

Επιστρέψτε στην Αρχική Οθόνη  
του CareLink Personal καθώς  
είστε έτοιμοι να φορτώσετε την  
Αντλία σας ή το Μετρητή σας στο  
CareLink™.

Ανατρέξτε στις Οδηγίες  
φόρτωσης.


**Medtronic**

# ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## ΝΕΑ Εφαρμογή Φόρτωσης CareLink™ Personal

Το πρώτο βήμα για να καταλάβετε περισσότερα για το διαβήτη σας.

### ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Ή ΜΕΤΡΗΤΗ

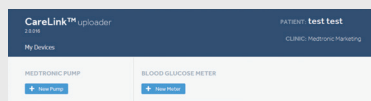


1 Επιλέξτε αντλία ή μετρητή


#### Αντλία



2 Επιλέξτε το μοντέλο της αντλίας σας

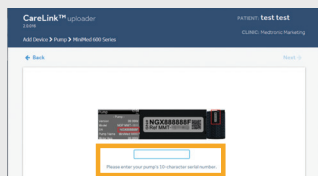


3 Εισάγετε τον αριθμό σειράς της αντλίας σας (SN)

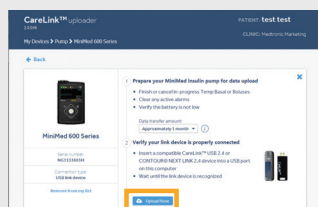

4

- Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι έτοιμη
- Κάντε κλικ στο "Προσθήκη Αντλίας"


#### Μετρητής

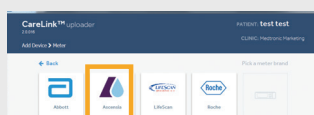

2 Επιλέξτε τη μάρκα του μετρητή αν θέλετε να φορτώσετε μόνο τα δεδομένα από το μετρητή σας



3 Επιλέξτε το μοντέλο του μετρητή

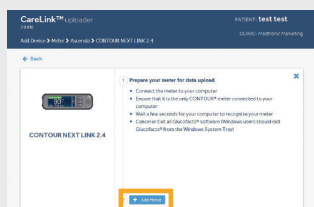


4

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής είναι έτοιμος
- Κάντε κλικ στο "Προσθήκη Μετρητή"

### ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ

Συνδέστε το USB ή το μετρητή σας στον υπολογιστή

- Το CareLink™ USB ή ο μετρητής να τοποθετούνται όσο πιο κοντά γίνεται με την αντλία
- ο μετρητής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την αντλία

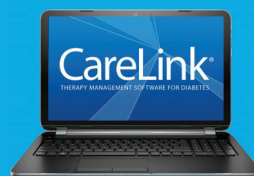


Βεβαιωθείτε ότι η αντλία σας είναι έτοιμη για φόρτωση. Ελέγξτε ότι η αντλία σας δεν βρίσκεται σε κάποια από τις παρακάτω οθόνες.



- ☐ Όχι Προσωρινός βασικός
- ☐ Όχι Ειδοποιήσεις
- ☐ Όχι Δόση σε εξέλιξη
- ☐ Όχι Χαμηλή μπαταρία


### ΔΥΟ ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ

#### ΒΗΜΑ 1

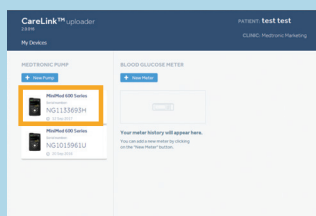

Επιλέξτε τη συσκευή

#### ΒΗΜΑ 2

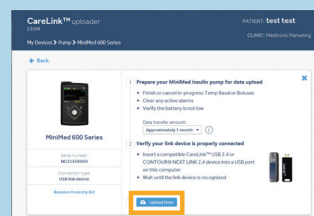

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι έτοιμη για τη φόρτωση των δεδομένων
- Κάντε κλικ στο "Φόρτωση τώρα"

#### Οδηγίες ασφαλείας: Λογισμικό CareLink™

Το λογισμικό CareLink™ προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για τη διαχείριση του διαβήτη και ΔΕΝ προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από μόνο του.

Medtronic Hellas  
Λεωφ. Κηφισίας 24 (κτίριο Β)  
151 25 Μαρούσι  
Αθήνα  
Τηλ. 210 6779099  
Φαξ. 210 6779399  
www.medtronic-diabetes.gr  
www.medtronic.com

### ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ



Συνδεθείτε με το σύστημα CareLink™ του γιατρού σας για αποτελεσματικότερη κοινή χρήση των δεδομένων σας.

© 2018 Medtronic. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Medtronic, το λογότυπο της Medtronic και το Further, Together είναι εμπορικά σήματα της Medtronic. Όλα τα υπόλοιπα σήματα είναι εμπορικά σήματα εταιριών της Medtronic. UC201812041 EL