

INSTALLATIONSANLEITUNG

NEU CareLink™ Personal Uploader

Einfach Daten hochladen
und Ihrem Arzt übermitteln.

**DURCH DAS
HOCHLADEN IHRER
DATEN KÖNNEN
SIE MEHR ÜBER
IHR DIABETES-
MANAGEMENT.**



Analysieren Sie Ihre Daten



Laden Sie regelmäßig Ihre
Daten hoch



Sprechen Sie mit Ihrem Arzt

LADEN SIE DIE INSTALLATIONSDATEIEN DES NEUEN UPLOADERS RUNTER


Sie müssen den Uploader nur einmal
auf Ihrem PC installieren.



- 1 Melden Sie sich an
Klicken Sie "So installieren Sie den Uploader"




- 2 Klicken Sie den
Download Link

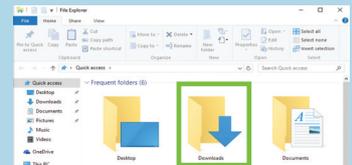


- 3 Öffnen Sie die
Installationsdateien


INSTALLIEREN SIE DEN UPLOADER

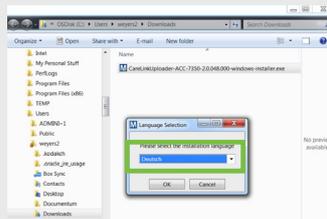


- 1 Wählen Sie Ihre Sprache

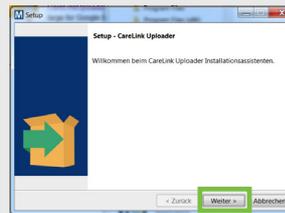

- 2 Klicken Sie "Weiter"

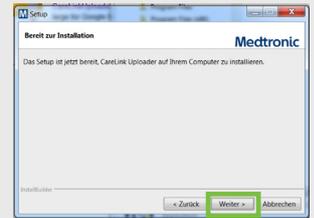

- 3 Klicken Sie "Weiter"

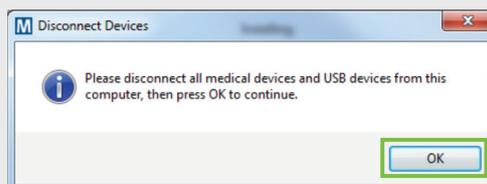

- 4 Stellen Sie sicher, dass Ihr CareLink™ USB-Stick oder Messgerät nicht
angeschlossen ist, und wählen Sie "OK".
Wählen Sie "Fertig stellen", um die Installation abzuschließen



JETZT KANN ES LOSGEHEN!

Gehen Sie auf die CareLink™
Personal Homepage und
starten Sie mit der Installation
des Uploaders.

carelink.minimed.eu.

Medtronic

ANLEITUNG DATENUPLAOD

CareLink™ Personal Uploader
Der erste Schritt, um Ihren Diabetes besser zu verstehen

VIER SCHRITTE UM EINE NEUE PUMPE ODER EIN BLUTZUCKERMESSGERÄT HINZUZUFÜGEN



1 Wählen Sie Pumpe oder Blutzuckermessgerät aus


Insulinpumpe



2 Wählen Sie Ihr Pumpenmodell aus



3 Geben Sie die Seriennummer Ihrer Pumpe ein

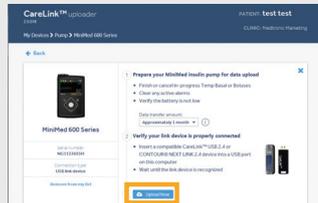

- 4**
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Pumpe bereit ist
 - Klicken Sie auf "Pumpe hinzufügen"

Blutzuckermessgerät



2 Wählen Sie die Marke Ihres Blutzuckermessgeräts, wenn Sie die Daten Ihres Messgeräts hochladen wollen



3 Wählen Sie das Modell Ihres Blutzuckermessgeräts aus



- 4**
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Blutzuckermessgerät bereit ist
 - Klicken Sie auf "Blutzuckermessgerät hinzufügen"

SO STARTEN SIE Schließen Sie Ihren CareLink™-USB Stick oder Ihr Blutzuckermessgerät an Ihren Computer an

- Der CareLink™-USB Stick oder das Blutzuckermessgerät müssen angesteckt und möglichst nahe zu Ihrer Pumpe platziert werden
- Das Blutzuckermessgerät muss mit Ihrer Pumpe verbunden sein




Stellen Sie sicher, dass Ihre Pumpe bereit für den Upload ist Die folgenden Bildschirme sollten dabei nicht auf Ihrer Pumpe angezeigt werden



- Keine temporäre Basalrate
- Keine Alarme
- Kein aktiver Bolus
- Kein niedriger Batteriestatus


IN ZWEI EINFACHEN SCHRITTEN DIE DATEN HOCHLADEN

SCHRITT 1

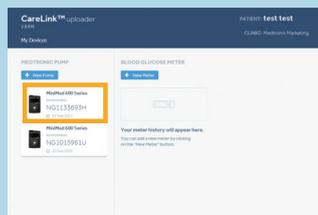

Wählen Sie Ihr Gerät aus

SCHRITT 2

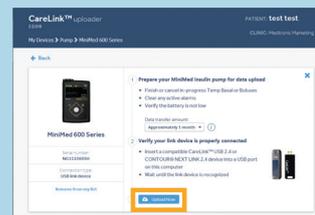

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät bereit für den Upload ist
- CKlicken Sie auf "Jetzt hochladen"

VERBINDEN SIE IHRE ACCOUNT MIT DER SOFTWARE IHRES ARZTES.



Sie können sich mit der CareLink™ Software Ihres Diabetesteam verbinden, um Ihre Daten dem Team zu übermitteln.

Sicherheitsinformation:

Die CareLink™-Software ist nur zur Unterstützung gedacht. Es ist NICHT beabsichtigt, sich darauf zu verlassen und Therapieentscheidungen basierend auf den Daten zu treffen.

Medtronic (Schweiz) AG

Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
diabetes.schweiz@medtronic.com
24-Stunden-Hotline:
0800 633 333
carelink.minimed.eu

Copyright © 2018:
Medtronic. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in Europa. Alle Marken sind
Marken von Medtronic.
UC201812041 SD