



MiniMed™ Mobile -sovelluksen aloitusopas



MiniMed™ Mobile - Käytön aloittaminen



1. Lataa sovellus, avaa se ja seuraa näytön ohjeita.
2. Kirjaudu sisään CareLink™ Personal -tilille. Rekisteröidy, jos sinulla ei vielä ole tiliä.
3. Liitä sovellus MiniMed™ 700G -sarjan pumpun pariin noudattamalla näytön ohjeita.
4. Lue Varoitus-näyttö ja hyväksy napauttamalla **OK** ja sitten **Hyväksy**.

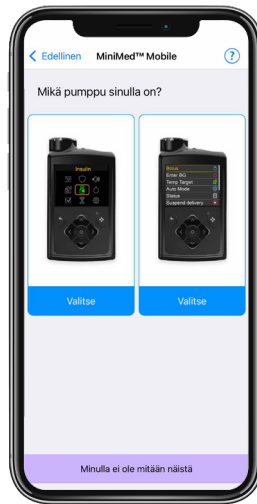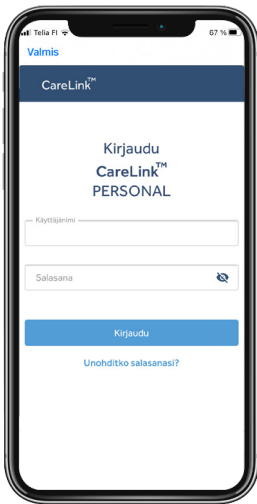

Seuraa puhelimen pyyntöä pariksi liittämisestä




Mobiililaitteen käyttäjärjestelmän automaattiset päivitykset tulisi poistaa käytöstä. Jos päivitys tulee saataville, tarkista verkkosivustolta tukeeko sovellus uutta käyttäjärjestelmää ennen sen asentamista.

Sovelluksen käyttö

CareLink™-synkronointi


Mahdollistaa tietojen latauksen CareLink™ Personal -ohjelmistoon. Kytke päälle automaattisia latauksia varten tai napauta **Lataa nyt** ladataksesi kaikki tiedot MiniMed™-pumpusta. Tässä valikossa voit myös hallita hoitokumppaneita.

Napauta kolmea palkkia ja pääset valikkoon

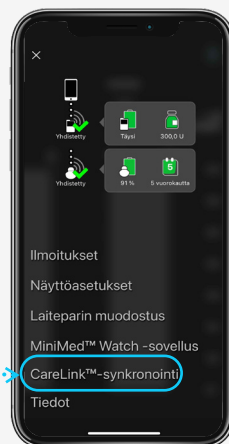

Sensorikäyrä, näet lisätietoja napauttamalla tapahtumamerkkejä

Nykyinen sensorin glukoosiarvo

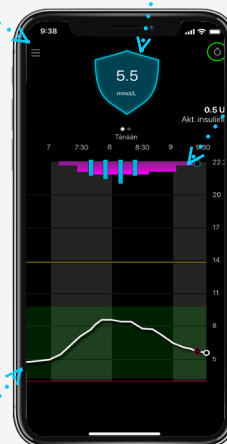

Insuliiniannostelun tiedot



Näet ajan tavoitealueella pyyhkäisemällä vasemmalle

Kuvissa sovellus yhdistettynä MiniMed™ 780G -järjestelmään. Mikä mobiililaitte on yhteensopiva sovelluksen kanssa? Tarkista yhteensopivuus osoitteessa [medtronic-diabetes.fi/tarkista-sovelluksen-yhteensopivuus](https://www.medtronic-diabetes.fi/tarkista-sovelluksen-yhteensopivuus).

MiniMed™ Mobile -sovelluksen asentaminen Apple® Watch -älykelloon

1. Varmista, että Apple Watch ja iPhone on yhdistetty. Voit tarkistaa tämän Bluetooth®-asetuksista. Lisätietoja osoitteessa <https://support.apple.com/fi-fi/guide/watch/apdde4d6f98e/watchos>.
2. Jos sinulla ei vielä ole MiniMed™ Mobile -sovellusta asennettuna, lataa se App Store -sovelluksesta.
3. Seuraavaksi tarvitset kumppanisovelluksen Apple Watch -älykelloon. Jos sovellus ei asennu automaattisesti, voit tehdä sen manuaalisesti **kahdella tapaa**.

1. Asenna älykellon kautta



- A. Paina Digital Crown -painiketta nähdäksesi aloitusnäytön ja napauta sitten **App Store** -sovellusta
- B. Napauta **Etsi** ja kirjoita "MiniMed Mobile"
- C. Etsi sovellus, jossa on tämä ikoni: ja napauta **Hae**

2. Asenna iPhoneen kautta



- A. Avaa Apple Watch -sovellus iPhoneessa
- B. Napauta **Oma Apple Watch** -välilehteä
- C. Napauta **Asenna** MiniMed™ Mobile -sovelluksen vieressä



MiniMed™ Mobile -sovellus


Käyttö Apple Watch -älykellossa

MiniMed™ 780G -järjestelmän käyttäjien MiniMed™ Mobile -sovellus on yhteensopiva myös Apple Watch -älykellon* kanssa. Voit tarkastella glukoosiarvoja kellotaulussa tai napauttaa näyttöä päästäksesi sovellukseen.

Puhelinsovelluksessa on myös valikko-vaihtoehto kellosovellukselle. Täältä näet, jos kellosi ei ole yhteensopiva pumpun kanssa tai jos sovellusta ei ole asennettu kelloon.**



Huomio: Ilmoitukset voidaan **hylätä** mobiililaitteesta, mutta ne tulee **kuittaa** pumpusta. Ilmoituksia ei voi hylätä eikä kuittaa Apple Watch -älykellosta.

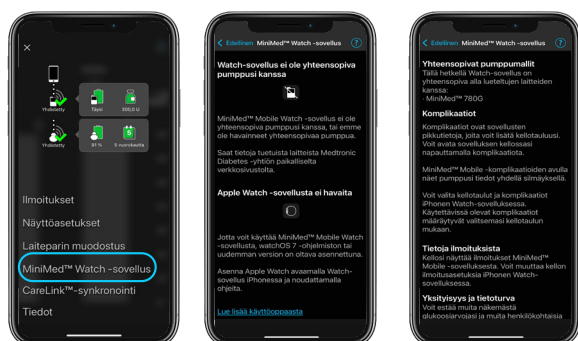

* Tarkista kaikki tuetut Apple® Watch- ja MiniMed™-laitteet verkkosivustolta.

** Jos puhelimen oletusasetuksena on olla lataamatta kumppanisovelluksia

MiniMed™ Mobile -sovellus

Apple Watch -älykellon ilmoitukset

Varmista, että iPhone-ilmoitusten peilaus on päällä

Avaa iPhonessa Apple Watch -sovellus.

Napauta **Ilmoitukset**.

Vieritä **Peilaa iPhone-ilmoitukset** -listaa, kunnes löydät MiniMed™ Mobile -sovelluksen.

Varmista, että peilaus on **päällä**.



Muista:

Jos iPhone ei ole lukittu, ilmoitukset eivät siirry Apple Watch -älykelloon. Ilmoitukset vastaanotetaan kelloon vain, jos iPhone on lukittu tai lepotilassa.

Käyttöaputoiminnot

Onko sinun hankala nähdä MiniMed™ Mobile -sovelluksen ruutuja Apple Watch -älykellossa? Voit lisätä kellotauluusi erilaisia komplikaatioita (erikoisominaisuuksia), jotta sovelluksen tiedot on helpompi nähdä. Voit lisätä komplikaatioita näin:

1. Kun kellotaulu on näkyvillä, pidä näyttöä painettuna ja napauta sitten Muokkaa.
2. Pyyhkäise vasemmalle aivan reunaan asti ja valitse sovelluksen komplikaatio napauttamalla sitä.
3. Käännä Digital Crownia nähdäksesi eri vaihtoehdot. MiniMed™ Mobile -sovelluksella on kolme komplikaatiota, voit valita haluamasi seuraavista vaihtoehdoista:* 1. XL, 2. Moduulit, 3. Kätevä



Lisätietoja saat osoitteesta [medtronic-diabetes.fi](https://www.medtronic-diabetes.fi).

* Kaikki kellomallit eivät tue kaikkia komplikaatioita.

MiniMed™ Mobile -sovellus

Usein kysytyt kysymykset

Mitä MiniMed™ Mobile -sovelluksen käyttämiseen tarvitaan?

MiniMed™ Mobile -sovelluksen käyttämiseen tarvitaan Medtronic MiniMed™ 700G -sarjan insuliinipumppu, yhteensopiva* mobiililaitte, CareLink™ Personal -tili ja Internet-yhteys.

Voivatko hoitokumppanit tarkastella tietojani ja saada hälytyksiä ja ilmoituksia?

Kyllä, hoitokumppani voi ladata CareLink™ Connect -sovelluksen yhteensopivaan* mobiililaitteeseen. Hoitokumppani tarvitsee pumpunkäyttäjän CareLink™ Personal -käyttäjätunnuksen asennuksen loppuunsaattamiseksi. Hoitokumppani voi määrittää teksitivestihälytyksiä CareLink™ Personal -verkkosivustolla. Jopa 5 hoitokumppania voi tarkastella saman pumpunkäyttäjän tietoja.

Voiko terveydenhuollon ammattilainen (hoitopaikkani) tarkastella tietojani?

Kyllä, mutta he eivät voi vastaanottaa hälytyksiä tai tarkastella reaaliaikaisia tietoja. Varmista, että MiniMed™ Mobile -sovelluksen **CareLink™-synkronointi -toiminto** on käytössä ja että CareLink™ Personal -tili on yhdistetty hoitopaikan CareLink™-järjestelmään. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat tämän jälkeen tarkastella tietojasi.

Mobiililaitteeseeni on saatavilla uusi käyttöjärjestelmäpäivitys, tulisiko minun päivittää?

Jos haluat varmistaa MiniMed™ Mobile -sovelluksen toimivuuden, emme suosittele päivittämään käyttöjärjestelmää välittömästi. Varmista, että automaattiset päivitykset on poistettu käytöstä mobiililaitteessasi ja päivitä manuaalisesti vasta, kun Medtronic on vahvistanut MiniMed™ Mobile -sovelluksen ja uuden käyttöjärjestelmäversion yhteensopivuuden.

MiniMed™ Mobile -sovellukseen on saatavilla päivitys, tulisiko minun päivittää?

Kyllä. MiniMed™ Mobile -sovelluksen uusia versioita voidaan käyttää välittömästi. Kehotamme käyttäjiä käyttämään aina uusinta saatavilla olevaa versiota.

Minulla on vaikeuksia liittää MiniMed™ Mobile -sovellusta pariiksi pumpun kanssa.

Varmista, että Bluetooth® on kytketty päälle puhelimen asetuksista. Poista kaikki aiemmin pariiksi liitetyt pumput ja varmista, että pumppu ja puhelin ovat enintään 3 metriä toisistaan, ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tekniseen tuotetukeen numerossa 0800 164 064.

Käytän Medtronicin insuliinipumppua, mutta sen malli on jokin muu kuin MiniMed™ 780G.

Voinko silti nähdä tietoni Apple Watch -älykellossa?

Et voi. Apple Watch on yhteensopiva ainoastaan silloin, kun MiniMed™ Mobile -sovellus on yhdistetty MiniMed™ 780G -järjestelmän insuliinipumppuun.

Onko Android-älykelloille saatavilla sovellusta?

Ei, tällä hetkellä sovelluksesta on saatavilla ainoastaan Apple Watch -versio.

Voinko tarkastella tietojani Apple Watch -älykellossa ilman yhteensopivaa älypuhelinia?

Et voi. Kello näyttää ainoastaan tietoja, jotka älypuhelin vastaanottaa pumpusta. Kello ei muodosta pariliitosta suoraan pumpun kanssa.

Tämän materiaalin sisältämiä tietoja ei tule pitää lääketieteellisinä neuvoina eivätkä ne korvaa keskustelua lääkärin kanssa.

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varotoimista, mahdollisista haittatapahtumista ja muista asioista.

Medtronic

Medtronic Finland Oy
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa
Puh.: +358 20 7281 200
Faksi: +358 20 7281 201

[medtronic.fi](https://www.medtronic.fi)
[medtronic-diabetes.fi](https://www.medtronic-diabetes.fi)

FI-SOF-2300002 ©2023 Medtronic. Kaikki oikeudet pidätetään.
Medtronic, Medtronic-logo ja Engineering the extraordinary ovat Medtronicin tavaramerkkejä. ^{TM*}
Kolmansien osapuolien tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Kaikki muut tuotemerkit ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä.