

Erste Schritte mit der MiniMed™ Mobile App






Erste Schritte mit der MiniMed™ Mobile App



1. Laden Sie die App herunter, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Melden Sie sich in Ihrem CareLink™ Personal Konto an. Registrieren Sie sich, wenn Sie noch kein Konto besitzen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App mit Ihrer MiniMed™ 700 Pumpe zu koppeln.
4. Lesen Sie die Warnhinweise auf dem Bildschirm und akzeptieren Sie, indem Sie auf **OK** und dann auf **Stimme zu** tippen.

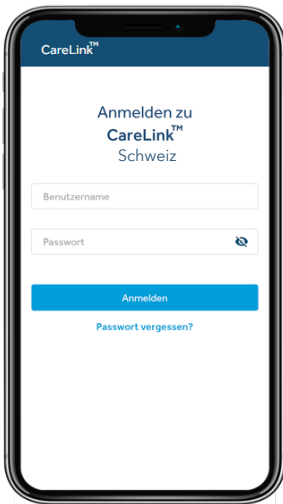

Vergessen Sie nicht, Ihr Telefon auf Anfragen zur Gerätekopplung zu kontrollieren.



Automatische Aktualisierungen für Mobilgeräte-Betriebssysteme sollten deaktiviert werden. Falls eine Aktualisierung vorliegt, prüfen Sie vor der Installation auf Ihrer lokalen Website, ob sie unterstützt wird.

Navigieren in der App


CareLink™ Synchronisation

Ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Daten, die auf CareLink™ Personal hochgeladen werden. Schalten Sie das automatische Hochladen ein oder tippen Sie auf «Jetzt hochladen», um alle Daten in Ihrer MiniMed™ Pumpe hochzuladen. In diesem Menü können Sie auch Ihre Vertrauenspersonen verwalten.

Zum Aufrufen des Menüs auf die drei Balken tippen

Aktueller Messwert des Sensors

Informationen zur Insulinabgabe

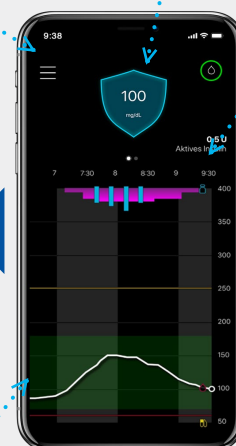

Sensorverlaufskurve. Für Details in der Grafik auf das jeweilige Ereignis tippen.

Nach links wischen, um «Zeit im Zielbereich» anzuzeigen

Die hier dargestellten Bilder entsprechen der Kopplung des MiniMed™ 780G Systems mit einem kompatiblen Mobilgerät. Prüfen Sie Ihr Gerät unter medtronic-diabetes.com/de-AT.

Installation der MiniMed™ Mobile App auf Ihrer Apple® Watch


1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Apple® Watch und Ihr iPhone miteinander gekoppelt sind. Sie können Ihre Bluetooth®-Einstellungen überprüfen und <https://support.apple.com/en-mn/guide/watch/apdde4d6f98e/watchos> aufrufen, wenn dies nicht der Fall sein sollte.
2. Laden Sie die MiniMed™ Mobile App aus dem App Store auf Ihr iPhone herunter, sofern Sie dies noch nicht gemacht haben.
3. Als Nächstes benötigen Sie die Begleit-App auf Ihrer Apple® Watch. Sollte diese nicht automatisch installiert werden, gibt es **zwei Möglichkeiten**, dies manuell nachzuholen.

A. Die App über Ihre Watch herunterladen



- A. Rufen Sie durch Drücken der Digital Crown den Startbildschirm auf und tippen Sie dann auf den **App Store**.
- B. Tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie «MiniMed Mobile» ein.
- C. Suchen Sie die richtige App mit diesem Symbol und tippen Sie auf **Laden**.

B. Die App über Ihr iPhone herunterladen

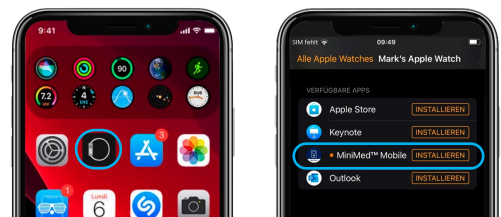


- A. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Watch App.
- B. Tippen Sie auf die Registerkarte **Meine Watch**.
- C. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Installieren** neben der MiniMed™ Mobile App.



MiniMed™ Mobile App (Apple Watch®)

Die MiniMed™ Mobile App mit den MiniMed™ 780G Pumpensystemen ist auch mit der Apple® Watch* kompatibel. Ihre Werte können Sie auf dem Zifferblatt Ihrer Uhr einsehen oder durch Antippen, wodurch sich die App öffnet.

Die iPhone App hat auch eine Menüoption für die Watch App. Die App kann Ihnen beispielsweise mitteilen, wenn Ihre Watch bzw. Pumpe nicht kompatibel ist oder wenn die App auf der Watch fehlt.**

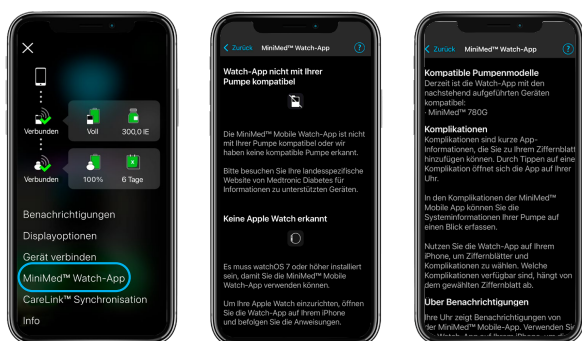

Hinweis: Benachrichtigungen können auf Ihrem Mobilgerät **verworfen** werden, müssen aber auf der Pumpe **gelöscht** werden. Sie können auf der Watch weder verworfen noch gelöscht werden.

* Rufen Sie <https://www.medtronic-diabetes.com/de-CH/app-kompatibilitaet> auf, um herauszufinden, welche Geräte von der Apple® Watch und der MiniMed™ Pumpe unterstützt werden.

** Wenn die Standardeinstellung auf dem iPhone so festgelegt wurde, dass keine Begleitwendungen heruntergeladen werden können.

MiniMed™ Mobile App

Apple Watch - Erhalt von Benachrichtigungen.

Achten Sie darauf, dass die Spiegelung aktiviert ist.

Öffnen Sie auf dem iPhone die Apple Watch App.

Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**.

Blättern Sie zur Liste **Spiegeln der iPhone-Warnmeldungen**.

Suchen Sie die MiniMed™ Mobile App und stellen Sie sicher, dass sie **aktiviert** ist.



Zur Erinnerung:
Bei entsperrem iPhone werden die Benachrichtigungen nicht an die Apple Watch weitergeleitet. Die Apple Watch empfängt nur dann Benachrichtigungen, wenn das iPhone gesperrt ist oder sich im Ruhezustand befindet.

Optionen zur Barrierefreiheit

Ist die MiniMed™ Mobile App auf Ihrer Uhr nur schwer zu erkennen? Sie können dem Zifferblatt Ihrer Uhr verschiedene Komplikationen hinzufügen, um es übersichtlicher zu gestalten - so funktioniert das.

1. Berühren und halten Sie bei angezeigtem Zifferblatt das Display und tippen Sie dann auf «Bearbeiten».
2. Wischen Sie nach links bis zum Anschlag und tippen Sie auf den Komplikationsknoten, den Sie nutzen möchten.
3. Blättern Sie mit der Digital Crown durch die Optionen. MiniMed™ Mobile verfügt über drei mögliche Komplikationen; wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihnen passt*: 1. Extra gross, 2. Modular gross, 3. Utility gross



* nicht alle Watches unterstützen alle Komplikationen

Häufig gestellte Fragen zur MiniMed™ Mobile App

Was benötige ich, um die MiniMed™ Mobile App nutzen zu können?

Für die Nutzung der MiniMed™ Mobile App sind eine Medtronic MiniMed™ 780G Insulinpumpe, ein kompatibles* Smartphone, ein Konto bei CareLink™ Personal und eine Internetverbindung erforderlich.

Können meine Vertrauenspersonen meine Daten einsehen und Warnmeldungen/Benachrichtigungen erhalten?

Ja, sie können die CareLink™ Connect App auf ein kompatibles* Mobilgerät herunterladen und benötigen dazu Ihren Benutzernamen für CareLink™ Personal, um die Konfiguration abzuschließen. SMS-Benachrichtigungen können auch von Vertrauenspersonen auf der CareLink™ Personal Website eingerichtet werden. Ihre Daten können von maximal 5 Vertrauenspersonen eingesehen werden.

Können meine behandelnden Ärzt*innen meine Daten einsehen?

Ja, allerdings können sie keine Warnmeldungen und Alarme empfangen oder Live-Daten einsehen. Achten Sie darauf, dass in Ihrer MiniMed™ Mobile App die Funktion **Synchronisierung mit CareLink™** aktiviert ist und Ihr Konto bei CareLink™ Personal mit dem Konto Ihrer behandelnden Ärzt*innen in CareLink™ System verknüpft ist. Ihre Ärzt*innen können dann bei Bedarf auf Ihre Daten zugreifen, ohne dass Sie etwas veranlassen müssen.

Für mein Mobilgerät ist ein neues Update verfügbar. Soll ich es aktualisieren?

Nicht sofort. Bitte achten Sie darauf, dass automatische Software Updates auf Ihrem Mobilgerät deaktiviert sind und aktualisieren Sie das Gerät erst dann manuell, wenn Medtronic die Kompatibilität der MiniMed™ Mobile App mit dem neuen Smartphone-Update bestätigt hat.

Für die MiniMed™ Mobile App ist eine Aktualisierung verfügbar. Soll ich sie aktualisieren?

Ja. Neue Versionen der MiniMed™ Mobile App können sofort verwendet werden. Wir empfehlen, stets mit der aktuellsten verfügbaren Version zu arbeiten.

Ich habe Probleme, die MiniMed™ Mobile App mit meiner Pumpe zu koppeln.

Achten Sie darauf, dass in den Einstellungen Ihres Smartphones Bluetooth® eingeschaltet ist. Löschen Sie alle zuvor gekoppelten Pumpen, stellen Sie sicher, dass Pumpe und Telefon nicht mehr als 3 Meter voneinander entfernt sind, und versuchen Sie es erneut. Sollte das Problem weiterbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Medtronic Diabetes Produkthotline.

Ich habe zwar eine Insulinpumpe von Medtronic, doch handelt es sich dabei nicht um das System MiniMed™ 780G.

Kann ich dennoch die Apple® Watch verwenden?

Nein. Die Apple® Watch kann nur von Benutzer*innen mit der MiniMed™ Mobile App und dem MiniMed™ 780G System verwendet werden.

Gibt es eine App für Android Watches?

Nein, derzeit gibt es nur die Apple-Version.

Kann ich meine Daten mit der Apple® Watch, aber ohne mein iPhone, sehen?

Nein. Ihre Watch zeigt Ihnen die Daten an, die Ihr iPhone von der Pumpe empfängt. Ihre Watch kann nicht direkt mit Ihrer Pumpe gekoppelt werden.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine medizinische Beratung dar und sollten keinesfalls als Alternative für ein Gespräch mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin betrachtet werden. Besprechen Sie Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmassnahmen, potenzielle Nebenwirkungen und alle weiteren Informationen mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Medtronic

Europa
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel.: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

EMEA-SOF-2300008. ©2023 Medtronic. Medtronic, das Medtronic Logo und Engineering the extraordinary sind Marken von Medtronic. Die Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle anderen Marken sind Marken eines Medtronic Unternehmens.

medtronic.eu