

Insertion et appairage du capteur Simplera Sync™

Inserteur, transmetteur et capteur tout-en-un.


Si vous passez au capteur Simplera Sync™, suivez les instructions ci-dessous.

Sites d'insertion

Âgés de 2 à 17 ans

Partie haute des fesses

Arrière de la partie supérieure du bras

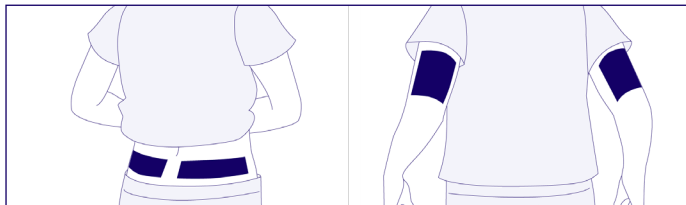

L'insertion sur l'abdomen pour la tranche d'âge de 2 à 17 ans n'a pas été évaluée en termes de précision.

Âgés de 18 ans et plus

Arrière de la partie supérieure du bras




L'insertion sur l'abdomen et la partie haute des fesses pour les patients âgés de 18 ans et plus n'a pas été évaluée en matière de précision.

Insertion du capteur



1. Sélectionnez et nettoyez le site d'insertion.

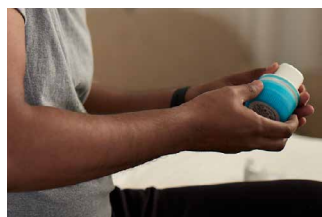

2. Inspectez l'inserteur pour vous assurer que le joint est intact, puis tournez le bouchon pour l'ouvrir.



3. Appuyez fermement mais rapidement l'inserteur contre le site d'insertion jusqu'à entendre un déclic.



4. Lissez l'adhésif à l'aide d'un doigt.

Désappairer l'appareil CGM actuel

1. Allez dans le **Menu principal** 2. Sélectionnez **Appareils appairés** 3. **Sélectionnez** le numéro d'appareil CGM correspondant à votre transmetteur Guardian™ 4. Sélectionnez **Désappairer** et confirmez en sélectionnant **Oui**

Appairer le capteur

Aucun désappairage n'est nécessaire avec le capteur Simplera Sync™. Lorsque vous appairez un nouvel appareil, l'ancien se déconnecte automatiquement.



Allez dans **Menu principal** > Appareils **appairés** > **Appairer un nouvel appareil**



Sélectionnez le numéro de l'appareil **CGM qui correspond au numéro de série** situé sur le dessus de l'inserteur



Confirmez que le code à l'écran correspond au **CODE** figurant sur l'inserteur



Numéro de série:
XXXX-XXX-XXX
Code: XXXXXX

Remarque: si le capteur Simplera Sync™ n'est pas appairé à la pompe dans les 20 minutes suivant le retrait du capuchon de l'inserteur, saisissez le CODE manuellement et sélectionnez **Confirmer** pour appairer le capteur.

† BG = Glycémie

‡ Prélèvements au doigt requis en mode manuel et pour accéder à SmartGuard. Si les symptômes ne correspondent pas aux alertes et aux mesures, utilisez un test au doigt. Consultez le guide de l'utilisateur.

Exclusion de responsabilité

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un avis médical et ne doivent pas se substituer à une consultation chez votre médecin. Discutez des indications, contre-indications, avertissements, précautions, événements indésirables potentiels et de toute autre information avec votre professionnel de santé.

20096073-fr-be © 2025 Medtronic. MiniMed et le logo MiniMed sont des marques commerciales de Medtronic MiniMed, Inc.

™*Les marques tierces sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société de Medtronic.